

Каталог

Ортопедические изделия



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



Mr. S.F

“

Если наша встреча стала событием счастливым и удачным, то создание группы компаний и управление ею – это миссия, которую мы ежедневно несём уверенно, настойчиво и компетентно.

”

*Памела Пировано и Паоло Росси,
владельцы компании
ORTHOSERVICE*

Содержание

Миссия и видение	4
О нас	6
Структура компании	8

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шея	15
Спина	19
Плечо	39
Локоть	47
Запястье	51
Кисть	57
Тазобедренный сустав	61
Колено	65
Голеностоп	85
Стопа	95
Линия ORTHOSELF	99

Каждый день
мы стремимся
стать лучше





Наша миссия

Проектируем, производим и продаем полный ассортимент ортопедических изделий, стелек и компрессионного трикотажа. Соотношение качества и стоимости изделий, производственная и управленческая гибкость позволили нашей компании занять лидирующее место. А еще, мы- семья, и успех -это не только личное достижение, но и прогресс всей компании.

Наше видение

Правильная организация, стремление обеспечить нашей продукцией как можно большее количество людей, делая ставку на гибкость и приверженность делу, и быть, поистине, образцом для специалистов-ортопедов, медиков и пациентов. Ведь эффективная и неинвазивная реабилитация не столько концепция, сколько способ помочь улучшить качество жизни.

Take
care
feel
better



Итальянский дизайн в проектировании

Разработка нового изделия это новый вызов, который мы принимаем с энтузиазмом. Мы хотим, чтобы ортез был функциональным - соответствовал рекомендациям врачей, практичным для техников-ортопедов, которые адаптируют его под пациента и эффективным, чтобы облегчить жизнь пациенту. Удовлетворить все потребности непросто, но найденное оригинальное решение, которое улучшает качество жизни пациента, позволяет нам сказать, что оно того стоило.

*Инженер Франческо Туркони R&S,
Главное управление Швейцария*



Европейское производство

Ortoveneta

Производственная площадка в Италии отвечает за изделия с компонентами из алюминия и пластика. Но еще до подачи заявки на компоненты к ортезам, нам нужно сконструировать машины для их обработки. Именно в этом должна проявиться наша креативность. Изобретательность и четкость - наш конек.

*Микеле Капорелло Генеральный директор
Ортовенета Италия*

ICS Orthoservice

В молдавском ремесленном производстве мы нашли отличного партнера. Здесь, в Молдове, мы производим изделия, которые требуют особого внимания к качеству, максимальной аккуратности и точности. Каждый проект - это результат работы настоящих перфекционистов.

*Маурицио Пиластро, Руководитель производства ICS,
Молдавия*



Швейцарская точность в планировании

Переход от теории к практике требует интуиции и терпения. Убедившись в целесообразности реализации проекта, выбираем сырье, соответствующее требуемым стандартам качества. Именно поэтому мы отдаем предпочтение поставщикам в пределах европейских границ. Выбор места производства зависит от типа продукции, планируемого способа и времени, с учетом уже имеющейся в каталоге линейки продукции. Иметь ясное представление о том, кто что делает – это наша цель.

Мауро Равезе, Отдел планирования производства, Главное управление Швейцария



Компания Orthoservice

Представлена на мировом рынке в 29 странах, является партнером крупнейших международных дистрибьюторов. Мы предлагаем гарантированное швейцарское качество и опыт, своевременную поддержку, обслуживание и индивидуализацию изделий. Наш административный штаб расположен в Швейцарии, работает в тесном сотрудничестве с производственными площадками, занимается исследованием, развитием и маркетингом. Мы постоянно изучаем потребности рынка, чтобы вовремя, эффективно и профессионально удовлетворять возникающие запросы на конкретное изделие, сохраняя узнаваемость бренда - это сложная командная работа.

Фабио Альбанезе Экспорт-менеджер



Единая система управления компании с несколькими производственными площадками



ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
2021 - Częstochowa, Польша



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
2011 - Baden-Baden, Германия



ICS ORTHOSERVICE
2010 - Balti, Молдавия



ORTHOSERVICE AG
1996 - Chiasso, Швейцария



ORTOVENETA
2007 - Maser, Италия



RO+TEN S.r.l.
1978 - Verano Brianza, Италия

О компании ORTHOSERVICE RO+TEN

- На рынке ортопедических изделий представлена с 1978 года
- Свыше 130 сотрудников
- 9 зарегистрированных патентов
- Продукция экспортируется в 20 стран



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

The presence of threaded holes and inserts on the orthopedic devices for the orthopedic personnel needing tools to apply the inserts. Other locking elements of the inserts disadvantageously increase the size of the articulated rod which should be small and as compact as possible. For adjusting an extension-flexion rotation the orthopedic device should provide an articulated rod is compact, stable and small.

ORTHO-SERVICE
RD+TEN
Take care! Keep cool!

ШЕЯ
15



cervilight soft



cervilight soft



cervistrong



cervilight schanz



cervistable



philastab

СПИНА
19



dorsolite



litecross93



litecross90



litecross91



lumboskill70



lumboskill72



lumbofit70



lumbofit72



flex-B



**sat 1323
sat 1355**



**sat 1322/
1322SH/1354**



**sat 1321
sat 1353**



**sat 1336
sat 1335**



**sat23
sat55**



**sat22
sat54**



**sat36
sat35**



**lumbopull
70 / 72**



dorsopull 74



spinalplus2.0



spinalplus



e-STAB



stabil-T



**modular
plus35K**



**modular-
plus 35 acqua**



**modularplus
45**



nhyco

ПЛЕЧО
39



shouldercross



octofix (cvb)



acromion 2.0



shouldfix



shouldfix II



**shouldfix
open (sfb)**



shouldfix 3



**top-S
10°/15°**



**top II-S
10°/15°**



**extra-S
15°/30°**



softab 20°



**softab
45°/70°**

ЛОКОТЬ
47



epilastik 32



episkill 32



epifit 32



elbo 2.0



**elbo 2.0
OPTION**



elbo



elbo OPTION



elbo OPTION

ЗАПЯСТЬЕ
51



sling-up 2.0



manulastik 19



manulite



polFIT 19

polFIT 17

polFIT 21

polFIT 22

carpo 41

КИСТЬ

57



daumfix



stax

ТАЗОБЕДРЕН-
НЫЙ СУСТАВ
61



hipocross



hipo



kafo



kinesio

КОЛЕНО
65



genuSKILL 60



genuFIT 60



genuSKILL 63



genuFIT 63



genuLASTIK 04



genuSKILL 04



genuFIT 04



genuSKILL 08



genuFIT 08



genuSKILL 08A



genuFIT 08A



genuSKILL 15



genuFIT 15



genuSKILL 15A



genuFIT 15A



genuSKILL 16



genuFIT 16



genuSKILL
22/22A



genuFIT 29/29A



genuSKILL 24A



genuFIT
30/30A



genuSKILL
26/26A



genuFIT 25/25A



genuSKILL 28A



genuFIT 27/27A



immok
0°/20°



go up open
go up



go up T



go up pcl



pluspoint 4



pluspoint 3



pluspoint
3 short



pluspoint
FAST



KOA



ORTHO-A

ГОЛЕНОСТОП
85



malleoLASTIK 37



malleoSILL 37



malleoFIT 37



malleoLITE



malleoSILL 81



malleoFIT 81



malleostrong
PRO



airstrong

ГОЛЕНОСТОП

85



malleonite



equal400



equal450



airstep tight
walker diabetic



airstep tight
walker short



airstep tight
walker



r.o.m walker



afo light



afo
extrastrong



affix



affix
OPTION

СТОПА

95



hallus valgus



havar



podifer 20



podifer 30



podifer 40



podifer 50



podifer 60

ЛИНИЯ
ORTHOSELF

99



EPI-S32



MANU-S19



MIO-S33




GENU-S60




MIO-S34



MALLEO-S37

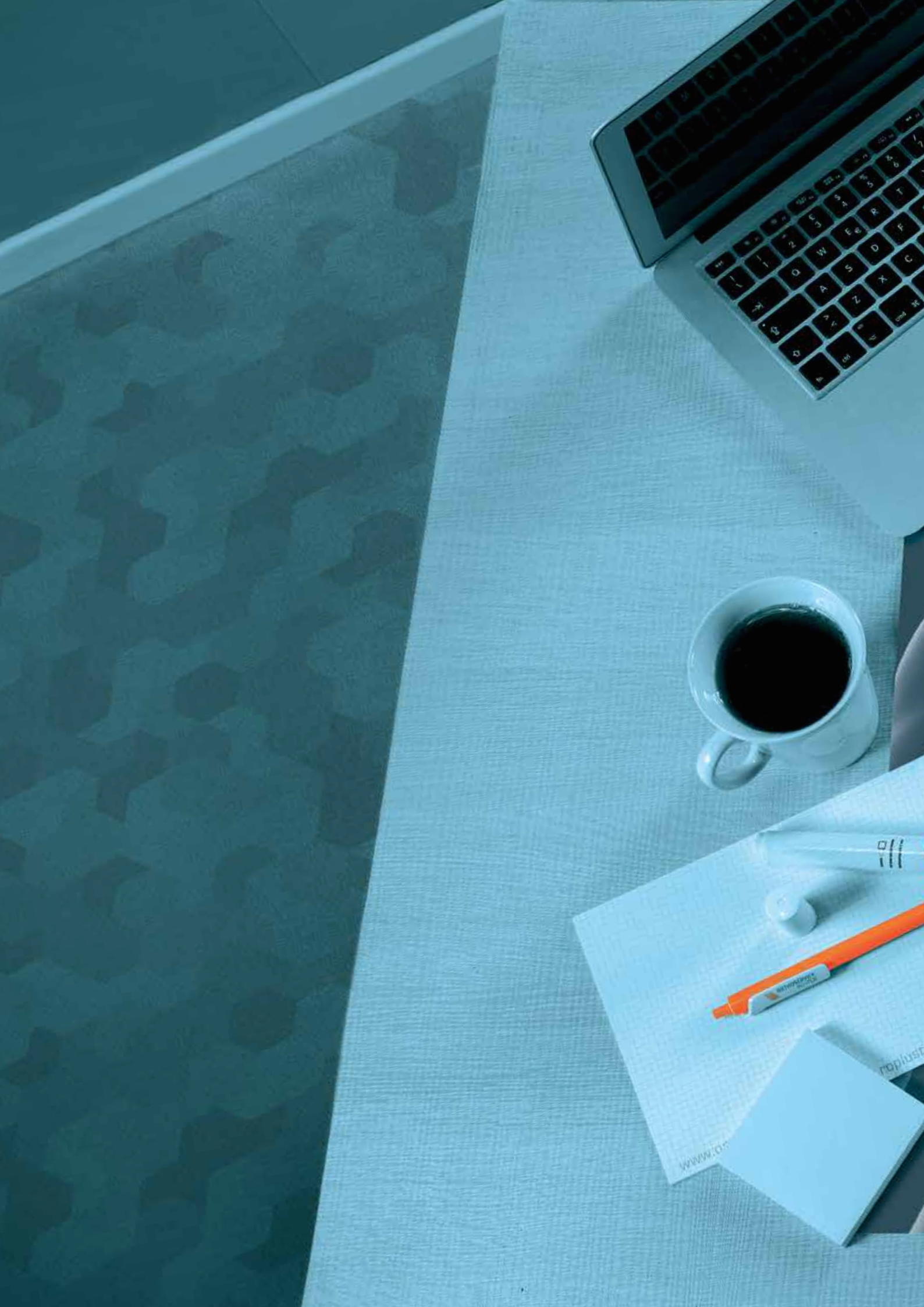

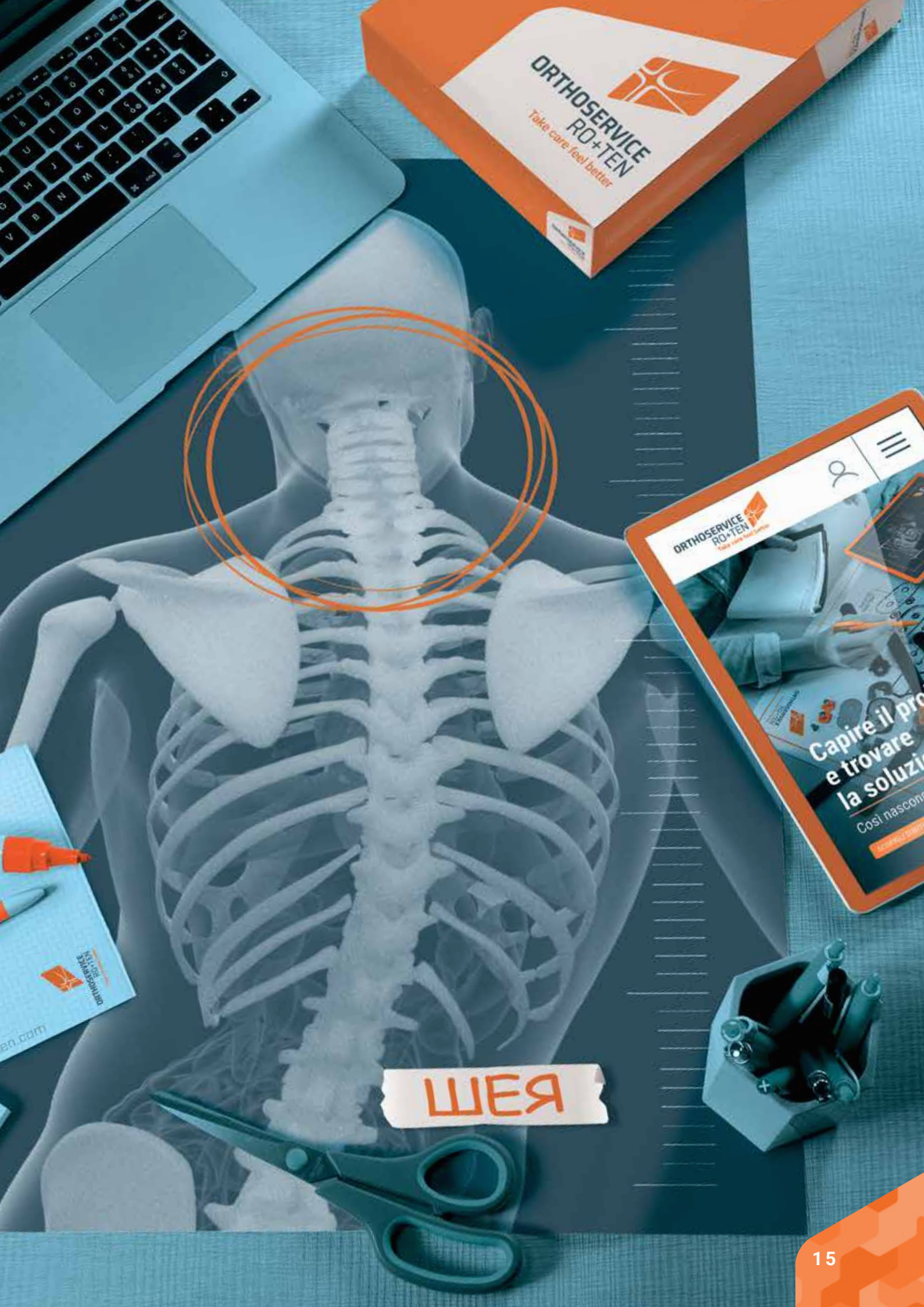

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care, feel better

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care, feel better

Capire il problema
e trovare la soluzione
Così nascono
le migliori soluzioni

WERA



cervilight soft

АПТ. M8302

Корсет-головодержатель

ПОКАЗАНИЯ

- Растяжение шейного отдела позвоночника (простреливающие боли)
- Кривошея
- Приступы головокружения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из полужесткой пенорезины (с закругленными краями)
- Покрытие из трубчатой трикотажной ткани
- Застежка сзади с помощью ремешка на липучках Velcro®
- Полностью моющийся (теплой водой (30°C) и pH-нейтральным мылом)
- Радиопрозрачный



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АПТ.

Размер

Обхват шеи (см)

Высота (см)

Цвет

M8302

S

M

L

XL

30/35

36/41

42/47

48/53

6-8-10

6-8-10

6-8-10

6-8-10

белый



cervilight soft

АПТ. M8304

Корсет-головодержатель

ПОКАЗАНИЯ

- Растяжение шейного отдела позвоночника (простреливающие боли)
- Кривошея
- Приступы головокружения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из полужесткой пенорезины (с закругленными краями)
- Покрытие из трубчатой трикотажной ткани
- Застежка сзади с помощью ремешка на липучках Velcro®
- Полностью моющийся (теплой водой (30°C) и pH-нейтральным мылом)
- Радиопрозрачный



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АПТ.

Размер

Обхват шеи (см)

Длина (см)

Высота (см)

Цвет

M8304

S

S

S

S

M

M

M

M

L

L

L

L

28/34

29/35

30/36

31/37

30/36

31/37

32/38

33/39

36/44

37/46

38/48

39/49

47

49

50

52

50

52

54

56

58

60

62

64

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

12

синий



Новинка 2022



cervistrong

Корсет-головодержатель

АРТ. M20304

ПОКАЗАНИЯ

- Легкие или умеренные растяжения шейного отдела позвоночника (хлыстовые травмы)
- Приступы головокружения цервикального происхождения
- Цервикальный артроз
- Умеренная дископатия, ассоциированная с цервикобрахиалгией

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из полужесткой пенорезины (с закругленными краями), с внутренним уплотнителем из полиэтилена
- Покрытие из трубчатой трикотажной ткани
- Застежка сзади с помощью ремешка на липучках Velcro®
- Полностью моющийся
- Радиопрозрачный
- Анатомическая форма



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



ANATOMICAL
FIT

АРТ.

Размер

Обхват шеи (см)

Высота (см)

Цвет

M20304

S

M

L

XL

30/35

36/41

42/47

48/53

6-8-10-12

6-8-10-12

6-8-10-12

6-8-10-12

серый

cervilight schanz

Корсет-головодержатель

АРТ. M1505



ПОКАЗАНИЯ

- Умеренное и выраженное растяжение шейного отдела позвоночника (простреливающие боли);
- Приступы головокружения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника;
- Тяжелые формы дископатии или межпозвоночной грыжи, сопровождающиеся болевым синдромом в шейно-грудном отделе позвоночника.
- Рекомендовано в послеоперационном периоде.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Жесткая пластиковая конструкция, перфорированная для улучшения вентиляции
- Окантовка из пенорезины, покрытой нетоксичной искусственной кожей
- Задняя застежка с ремешком на липучке Velcro®
- Регулируемая высота с помощью липучки Velcro®
- Радиопрозрачный



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АРТ.

Размер

Обхват шеи (см)

Передняя высота шеи (см)

Цвет

M1505

S

SL

M

L

30/35

35/40

35/40

40/45

9/12

9/12

10/14

10/14

белый



cervistable

АРТ. M1530/T

Корсет-головодержатель "Филадельфия" с отверстием в области трахеи

ПОКАЗАНИЯ

- Вывихи шейного отдела позвоночника от серьезной до тяжелой степени (хлыстовая травма)
- Множественная дископатия шейного отдела позвоночника
- Травмы шеи
- Патологические проседания, развивающиеся в присутствии метастазов в шейном отделе позвоночника
- Предназначен для послеоперационного периода хирургии позвоночника



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция состоит из двух охватывающих шею створок с застежками на липучках Velcro®;
- Конструкция выполнена из нетоксичного полипропилена согласно нормам UNI EN ISO 10993-5;
- Жесткие пластины для усиления по центру спереди и сзади;
- Прозрачный для ионизирующего излучения и влагонепроницаемый;
- Профилирован для отличного прилегания к подбородку, затылку и плечам;
- Трахеальное отверстие и отверстия для вентиляции;
- Предусмотрено соединение с грудным стабилизатором или с гиперэкстензором



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОПЦИЯ: MIP35/PC



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОПЦИЯ: M1522H

АРТ.

Размер

Обхват шеи (см)

Высота шеи* (см)

Цвет

M1530/T

S

30/35

M

35/40

L

40/45

2^{1/4} = 6 см · 3^{1/4} = 8 см · 4^{1/4} = 11 см · 5^{1/4} = 13 см

бежевый

* вертикальное расстояние между верхней частью плеча и подбородком

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

MIP35/PC Connect, соединительная пластина к гиперэкстензору ModularPlus или Iper35
M1522H ремень для поддержки подбородка



philastab

АРТ. M1521

Корсет-головодержатель "Филадельфия" с отверстием в области трахеи

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы в шейном отделе позвоночника;
- Шейный спондилез и множественная дископатия;
- Деформации в шейном отделе позвоночника вследствие остеопороза и метастазов.
- Рекомендуется к применению в послеоперационном периоде.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Каркасный стержень из ПВХ
- Покрытие из низкотермопластичного материала PLASTAZOTE
- Фиксация спереди к головодержателю с помощью кнопок для крепления, и на задней поверхности с помощью ремней на липучках Velcro.
- Радиопрозрачный



АРТ.

Размер

Цвет

M1521

универсальный

бежевый



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care, feel better

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care, feel better

Capire il pro
e trovare
la soluzi
Così nascono

СПИНА



dorsolite

Корректор осанки

АРТ. M91111

ПОКАЗАНИЯ

- Коррекция осанки, кифозные положения и синдром крыловидной лопатки
- Используется в качестве вспомогательного средства при постуральных болях в спине



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Каркас и ремни выполнены из вспененного полиэтилена, обшитого технической тканью и велюром.
- Скрещивание ремней по центру спины при обороте вокруг корпуса для наилучшего крепления.
- Пряжки регулируются и укорачиваются посредством липучек велкро:
 - Регулирование общей длины
 - Регулирование положения бретелей
- Легко носить, как рюкзак.
- Передняя застёжка с фиксатором.

АРТ.

Размер

Высота (см)

Цвет

M91111

универсальный

30

кремовый



litecross93

АПТ. M1093C - M1093S

Корсет эластичный на поясничный отдел позвоночника, заниженный, с жесткими термоформуемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице;
- Люмбоишалгия и люмбокуралгия;
- Эластичные ленты с перекрестным затягиванием для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из эластичной, дышащей, нераспускаемой и антистатической ткани Sensitive®;
- Эластичные ленты для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Застежка спереди на липучках Velcro®;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами.
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача)
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача)
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



ANATOMICAL FIT BREATHABLE



LOW PROFILE CUSTOMIZABLE FIT



M1093C



M1093S



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE RIGID THERMOFORMABLE PAD

АПТ.

Размер

Обхват таз (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1093C - M1093S

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140
14	14	14	14	14	14	14
23	23	23	23	23	23	23

кремовый - черный / XXXL только черный

опция: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (16 см)



litecross90

АПТ. M1090C
M1090H - M1090S

Корсет эластичный на поясничный отдел позвоночника, низкий, с жесткими термоформуемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице;
- Люмбоишалгия и люмбокуралгия;
- Эластичные ленты с перекрестным затягиванием для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из эластичной, дышащей, нераспускаемой и антистатической ткани Sensitive®;
- Эластичные ленты для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Застежка спереди на липучках Velcro®;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



ANATOMICAL FIT BREATHABLE



LOW PROFILE CUSTOMIZABLE FIT



M1090C



M1090H



M1090S



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE RIGID THERMOFORMABLE PAD

АПТ.

Размер

Обхват таз (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1090C - M1090H - M1090S

XS	S	M	L	XL	XXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
19	19	19	19	19	19
28	28	28	28	28	28

M1090C = кремовый • M1090H = голубой • M1090S = черный

опция: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (22 см)



litecross91

АПТ. M1091C
M1091H - M1091S


Корсет эластичный на поясничный отдел позвоночника, высокий, с жесткими термоформуемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице;
- Люмбоишиалгия и люмбаго;
- Эластичные ленты с перекрестным затягиванием для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из эластичной, дышащей, нераспускаемой и антистатической ткани Sensitive®;
- Эластичные ленты для вариативной поддержки и наилучшей фиксации;
- Застежка спереди на липучках Velcro®;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

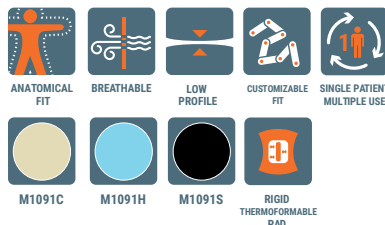

АПТ.

Размер

Обхват таза (см)

Передняя высота шеи (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1091C · M1091H · M1091S

XS	S	M	L	XL	XXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
23	23	23	23	23	23
33	33	33	33	33	33

M1091C = кремовый · M1091H = голубой · M1091S = черный

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)




lumboSkill70

АРТ. М33170

Корсет поясничный, низкий, с жесткими термоформуемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице, люмбагия;
- Люмбоишалгия;
- Спондилоартроз и дископатия поясницы;
- Легкие травмы в пояснично-крестцовом отделе и контрактуры паравертебральных мышц в поясничной области;
- Послеоперационное восстановление;

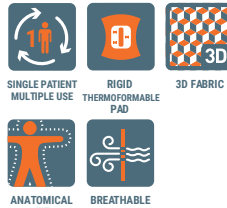

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Передняя и боковые части корсета имеют «постепенно сужающуюся» форму для наибольшего натяжения в центре и большей «мягкости» по бокам; Корсет выполнен из полиэстера и эластомера.
- Задняя часть корсета выполнена из ткани BreathSkill:
 - мягкая и дышащая;
 - 3D текстура;
 - внешнее покрытие из специальной сетчатой вязки для придания большей прочности.
- Ленты с прочным покрытием для наилучшей, регулируемой и индивидуальной фиксации;
- Брюшная часть усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передняя застежка на липучках Velcro®;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

АРТ.	М33170					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	20	20	20	20	20	20
Задняя высота (см)	26	26	26	26	26	26
Цвет	серый					

АРТ.	М33170					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	20	20	20	20	20	20
Задняя высота (см)	26	26	26	26	26	26
Цвет	серый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (20/22 см)



lumboSkill72

АРТ. М33172

Корсет поясничный, высокий, с жесткими термоформуемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице, люмбагия;
- Люмбоишалгия;
- Спондилоартроз и дископатия поясницы;
- Легкие травмы в пояснично-крестцовом отделе и контрактуры паравертебральных мышц в поясничной области;
- Послеоперационное восстановление;
- Последствия стабильных компрессионных переломов поясничного отдела позвоночника;
- Лечение переломов и дегенеративных процессов


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Передняя и боковые части корсета имеют «постепенно сужающуюся» форму для наибольшего стягивания в центре и большей «мягкости» по бокам; Корсет выполнен из полиэстера и эластомера.
- Задняя часть корсета выполнена из ткани BreathSkill:
 - мягкая и дышащая;
 - 3D текстура;
 - внешнее покрытие из специальной сетчатой вязки для придания большей прочности.
- Ленты с прочным покрытием для наилучшей регулируемой индивидуальной фиксации;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передняя застежка на липучках Velcro®.
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

АРТ.	М33172					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	22	22	22	22	22	22
Задняя высота (см)	32	32	32	32	32	32
Цвет	серый					

АРТ.	М33172					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	22	22	22	22	22	22
Задняя высота (см)	32	32	32	32	32	32
Цвет	серый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (24/26 см)

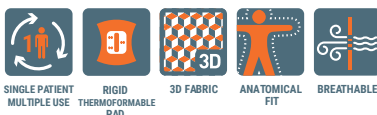

Арт. **MT1170**


lumbofit70

Корсет поясничный, низкий, с жесткими термоформуемыми пластинами



ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице;
- Люмбоишиас и люмбокуралгия;
- Спондилоартроз и поясничная дископатия;
- Легкие травмы в пояснично-крестцовом отделе и контрактуры паравертебральных мышц в поясничной области;
- Послеоперационный период.

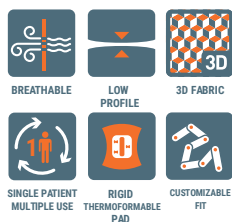

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Отдельные ленты с высоким уровнем охвата для лучшей поддержки и индивидуальной регулировки;
- Передняя и боковая конструкция из вискозного волокна и эластомера;
- Задняя конструкция из дышащей ткани AirX™: не вредной, не цитотоксической, не содержащей латекса;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передняя застежка на липучках Velcro®.
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

Арт.

Размер

Обхват талии (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

MT1170

XS	S	M	L	XL	XXL
50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
20	20	20	20	20	20
26	26	26	26	26	26

черный

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (22 см)

Арт. **MT1172**

lumbofit72

Корсет поясничный, высокий, с жесткими термоформуемыми пластинами




ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице;
- Люмбоишиас и люмбокуралгия;
- Спондилоартроз и поясничная дископатия;
- Легкие травмы в пояснично-крестцовом отделе и контрактуры паравертебральных мышц в поясничной области;
- Послеоперационный период;
- Последствия стабильных компрессионных переломов поясничного отдела позвоночника;
- Лечение переломов и дегенеративных процессов

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Отдельные ленты с высоким уровнем охвата для лучшей поддержки и индивидуальной регулировки;
- Передняя и боковая конструкция из вискозного волокна и эластомера;
- Задняя конструкция из дышащей ткани AirX™: гипоаллергенной, не содержащей латекса;
- Брюшная область усилена косыми спиралевидными шинами;
- Передняя застежка на липучках Velcro®.
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки, возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

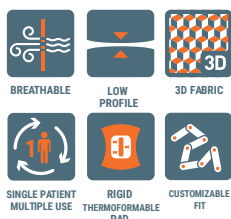

Арт.

Размер

Обхват талии (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

MT1172

XS	S	M	L	XL	XXL
50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
22	22	22	22	22	22
32	32	32	32	32	32

черный

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)




flex-B

АРТ. M33009

Корсет груднопоясничный с корректором

ПОКАЗАНИЯ

- Дорсалгия вследствие артрита или кифоза;
- Последствия переломов грудного и/или верхней части поясничного отделов позвоночника;
- Последствия проседания позвонков грудного отдела в результате остеопороза или метастаз;
- Другие показания по назначению врача.

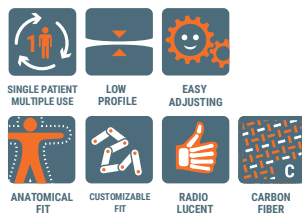

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция выполнена из эластичной, дышащей, нераспускаемой, антистатической и бактериостатической ткани CarbonTrace, усиленной углеродным волокном;
- Лямки, регулируемые по длине с помощью противоскользящих застежек на липучках Velcro®;
- Дополнительные мягкие подкладки для плеча;
- Задняя эластичная вставка;
- Брюшные эластичные ремни для регулируемой и индивидуальной поддержки;
- Передняя застежка на липучках Velcro®;
- Брюшная область, усилена косыми спиральными шинами;
- Моделируемый каркас из радиопрозрачного алюминиевого сплава.

АРТ.

M33009

Размер

XS

S

M

L

XL

XXL

Обхват таза (см)

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Передняя высота (см)

16

16

16

16

16

16

Задняя высота (см)

50

50

50

52

52

52

Цвет

серый

ОПЦИЯ: Каркас M33009/T (размер 1-L) подходит для размеров от XS до M, но по высоте как XXL



Новинка 2022



M1323



Новинка 2022



M1355


sat 1323 sat 1355

АПТ. M1323 TAILORED
АПТ. M1355 REGULAR

Корсет поясничный, низкий, с жесткими моделируемыми пластинами для усиления фиксации

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице
- Люмбаго и люмбаго-люмбалгия
- Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц
- Послеоперационный период
- Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
- Лечение перелома поперечных отростков позвоночника

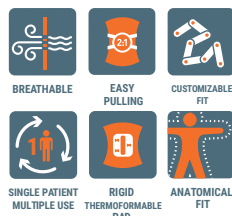

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Основной материал:
 - (98%) - обеспечивает оптимальную поддержку
 - дышащий натуральный состав гарантирует максимальный комфорт
 - эксклюзивный анатомический дизайн;
- Доступен в двух видах посадки:
 - Regular fit (REF. 1355) Стандартная посадка
 - Tailored fit (REF. 1323) Индивидуальная посадка;
- Система фиксации:
 - прочные эластичные ленты способствуют правильной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника, latex free без латекса
 - удобное застегивание требует минимальных усилий
 - благодаря фиксаторам из мягкого полимерного материала корсет легко надевать и снимать;
- Застегивается спереди с помощью липучек Velcro® с удобным захватом, обеспечивающим легкую фиксацию. Рифленая поверхность способствует максимальному комфорту;
- Передние и задние жесткие термоформируемые пластины (использовать по рекомендации врача)
- В комплекте идут жесткие моделируемые пластины, для использования по медицинским показаниям в поясничной области корсета, вставив в специальные 4 кармана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

АПТ.	M1323 tailored					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Передняя высота (см)	21	21	21	21	21	21
Задняя высота (см)	33	33	33	33	33	33
Цвет	бежевый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)

АПТ.	M1355 regular					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Передняя высота (см)	20	20	20	20	20	20
Задняя высота (см)	32	32	32	32	32	32
Цвет	бежевый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)



Новинка 2022



M1322



M1322SH
front lowered

sat 1322 / 1322SH / 1354

АПТ. M1322 TAILORED
АПТ. M1354 REGULAR
АПТ. M1322SH
FRONT LOWERED

Корсет поясничный, высокий, с жесткими моделируемыми пластинами для усиления фиксации

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице
- Люмбоишиас и люмбокруралгия
- Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц
- Послеоперационный период
- Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
- Лечение перелома поперечных отростков позвоночника
- Дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника
- Спондилолиз с или без листеза позвоночника



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Основной материал:
 - (98%) - обеспечивает оптимальную поддержку
 - дышащий натуральный состав гарантирует максимальный комфорт
 - эксклюзивный анатомический дизайн
- Доступен в трех видах посадки:
 - Regular fit (REF. 1354)/Стандартная посадка
 - Tailored fit (REF. 1322)/Индивидуальная посадка
 - Tailored fit, front lowered (REF. 1322SH)/Заниженная спереди индивидуальная посадка
- Система фиксации:
 - прочные эластичные ленты способствуют правильной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника, latex free без латекса
 - удобное застегивание требует минимальных усилий
 - благодаря фиксаторам из мягкого полимерного материала корсет легко надевать и снимать
- Застегивается спереди с помощью липучек Velcro® с удобным захватом, обеспечивающим легкую фиксацию. Рифленая поверхность способствует максимальному комфорту;
- Передние и задние жесткие термоформируемые пластины (использовать по рекомендации врача)
- В комплекте идут жесткие моделируемые пластины, для использования по медицинским показаниям в поясничной области корсета, вставив в специальные 4 кармана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



Новинка 2022



M1354



АПТ.

Размер

Обхват таза (см)

Задняя высота (1322) (см)

Задняя высота (1322SH) (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1322 tailored /
M1322SH front lowered tailored

XS	S	M	L	XL	XXL
75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
23	23	23	23	23	23
19	19	19	19	19	19
38	38	38	38	38	38

бежевый

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)

АПТ.

Размер

Обхват таза (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1354 regular

XS	S	M	L	XL	XXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
23	23	23	23	23	23
35	35	35	35	35	35

бежевый

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)



Новинка 2022



M1321



sat 1321 sat 1353

АПТ. M1321 TAILORED
АПТ. M1353 REGULAR

Корсет эластичный на поясничный отдел позвоночника с перекрестным затягиванием, с жесткими моделируемыми пластинами для усиления фиксации. Абдоминальный

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице
- Люмбоишиас и люмбокруралгия
- Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц
- Послеоперационный период
- Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
- Лечение перелома поперечных отростков позвоночника
- Дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника
- Спондилолиз с или без листеза позвоночника

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Основной материал:
 - (98%) - обеспечивает оптимальную поддержку
 - дышащий натуральный состав гарантирует максимальный комфорт
 - эксклюзивный анатомический дизайн;
- Анатомический дизайн в сочетании со специальной рифленой поверхностью в передней части корсета обеспечивает комфортное прилегание. Доступен в двух видах посадки:
 - Regular fit (REF. 1353) Стандартная посадка
 - Tailored fit (REF. 1321) Индивидуальная посадка;
- Система фиксации:
 - прочные эластичные ленты способствуют правильной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника, latex free без латекса
 - удобное застегивание требует минимальных усилий
 - благодаря фиксаторам из мягкого полимерного материала корсет легко надевать и снимать
- Боковая застежка на липучках Velcro® снабжена специальным карманом;
- Передние и задние жесткие термоформируемые пластины (использовать по рекомендации врача)
- В комплекте идут жесткие моделируемые пластины, для использования по медицинским показаниям в поясничной области корсета, вставив в специальные 4 кармана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



АПТ.	M1321 tailored					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Передняя высота (см)	31	31	31	31	31	31
Задняя высота (см)	38	38	38	38	38	38
Цвет	бежевый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)

АПТ.	M1353 regular					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Передняя высота (см)	31	31	31	31	31	31
Задняя высота (см)	35	35	35	35	35	35
Цвет	бежевый					

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)



Новинка 2022



M1336



sat 1336 sat 1335

АПТ. M1336 TAILORED
АПТ. M1335 REGULAR

Корсет груднопоясничный с корректором, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Дорсалгия вследствие артроза или кифоза;
- Последствия переломов в грудном отделе позвоночника и/или в верхней части поясницы;
- Последствия проседания позвонков в грудном отделе позвоночника вследствие остеопороза или метастаз.
- Другие показания по назначению врача

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Основной материал:
 - плотный неэластичный хлопок (98%)
 - обеспечивает оптимальную поддержку
 - дышащий натуральный состав гарантирует максимальный комфорт
 - Эксклюзивный анатомический дизайн;
- Доступен в двух видах посадки:
 - Regular fit (REF. 1335)/Стандартная посадка
 - Tailored fit (REF. 1336)/Индивидуальная посадка
- Система фиксации:
 - прочные эластичные ленты способствуют правильной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника latex free без латекса
 - удобное застегивание с минимальными усилиями
 - благодаря фиксаторам из мягкого полимерного материала корсет легко надевать и снимать;
- Плечевые ремни снабжены мягкими подушечками в области подмышек;
- Корсет застегивается спереди с помощью липучек Velcro® с удобным захватом, что обеспечивает легкую фиксацию;
- Передние и задние жесткие термоформируемые пластины (использовать по рекомендации врача)
- В комплекте идут жесткие моделируемые пластины (использовать по медицинским показаниям вставив в 4 задних кармана);
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



АПТ.

Размер

Обхват таза (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1336 tailored

XS	S	M	L	XL	XXL
75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
21	21	21	21	21	21
55	55	55	55	55	55

бежевый

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (38 см)

АПТ.

Размер

Обхват таза (см)

Передняя высота (см)

Задняя высота (см)

Цвет

M1335 regular

XS	S	M	L	XL	XXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
23	23	23	23	23	23
55	55	55	55	55	55

бежевый

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (38 см)



Новинка 2022



M1335






sat23 sat55

АРТ. M1623C - M1623H ЖЕНСКИЙ
АРТ. M1655C - M1655H МУЖСКОЙ

Корсет поясничный, низкий, с жесткими моделируемыми пластинами для усиления фиксации

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице
- Люмбоишиас и люмбаго
- Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц
- Послеоперационный период
- Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
- Лечение перелома поперечных отростков позвоночника

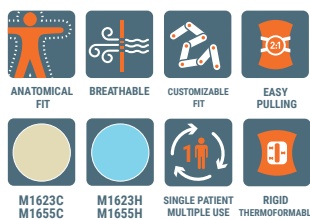

M1623C M1655C M1623H M1655H SINGLE PATIENT MULTIPLE USE RIGID THERMOFORMABLE PAD

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Система натяжения с эластичными затяжками и лебедочным механизмом для необходимого уровня фиксации;
- Передняя застежка на липучках Velcro®;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Задняя вставка из сетчатой ткани для обеспечения максимальной воздухопроницаемости;
- Хлопковая ткань с минимальным процентным содержанием эластана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

АРТ.	M1623C · M1623H ЖЕНСКИЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	21	21	21	21
Задняя высота (см)	33	33	33	33
Цвет	M1623C = кремовый · M1623H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)

АРТ.	M1655C · M1655H МУЖСКОЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130
Передняя высота (см)	20	20	20	20
Задняя высота (см)	32	32	32	32
Цвет	M1655C = кремовый · M1655H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (26 см)



sat22 sat54

АРТ. M1622C - M1622H ЖЕНСКИЙ
АРТ. M1654C - M1654H МУЖСКОЙ

Корсет поясничный, высокий, с жесткими моделируемыми пластинами для усиления фиксации

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в пояснице
- Люмбоишиас и люмбаго
- Спондилоартроз и дископатия поясничного отдела
- Легкие травмы пояснично-крестцового отдела и контрактуры паравerteбральных и поясничных мышц
- Послеоперационный период
- Последствия проседания позвонков в поясничном отделе
- Лечение перелома поперечных отростков позвоночника
- Дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника
- Спондилолиз с или без листеза позвоночника



M1622C M1654C M1622H M1654H SINGLE PATIENT MULTIPLE USE RIGID THERMOFORMABLE ANATOMICAL FIT BREATHABLE CUSTOMIZABLE FIT EASY PULLING PAD

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Система натяжения с эластичными затяжками и лебедочным механизмом для необходимого сжатия и отличной фиксации;
- Передняя застежка на липучках Velcro®;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Задняя вставка из сетчатой ткани для обеспечения максимальной воздухопроницаемости;
- Хлопковая ткань с минимальным процентным содержанием эластана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.

АРТ.	M1622C · M1622H ЖЕНСКИЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	23	23	23	23
Задняя высота (см)	38	38	38	38
Цвет	M1622C = кремовый · M1622H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)

АРТ.	M1654C · M1654H МУЖСКОЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130
Передняя высота (см)	23	23	23	23
Задняя высота (см)	35	35	35	35
Цвет	M1654C = кремовый · M1654H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (30 см)



sat36 sat35

АРТ. M1636C - M1636H ЖЕНСКИЙ
АРТ. M1635C - M1635H МУЖСКОЙ

Корсет груднопоясничный с корректором, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Дорсалгия вследствие артроза или кифоза;
- Последствия переломов в грудном отделе позвоночника и/или в верхней части поясницы;
- Последствия проседания позвонков в грудном отделе позвоночника вследствие остеопороза или метастаз;
- Другие показания по назначению врача.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Система натяжения с эластичными затяжками и лебедочным механизмом для необходимого сжатия и отличной фиксации;
- Плечевые ремни имеют мягкую подкладку в области подмышек;
- Передняя застежка на липучках Velcro®;
- Передние и задние жесткие термоформуемые пластины (использовать по рекомендации врача);
- С помощью 4-х жестких моделируемых шин, вставляемых дополнительно в задние кармашки возможно усиление фиксации поясничной области (использовать по рекомендации врача);
- Задняя вставка из сетчатой ткани для обеспечения максимальной воздухопроницаемости;
- Хлопковая ткань с минимальным процентным содержанием эластана;
- Корсет можно адаптировать к индивидуальной патологии пациента.



Арт.	M1636C · M1636H ЖЕНСКИЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	75/90	90/105	105/120	120/135
Передняя высота (см)	21	21	21	21
Задняя высота (см)	55	55	55	55
Цвет	M1636C = кремовый · M1636H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (38 см)

Арт.	M1635C · M1635H МУЖСКОЙ			
Размер	S	M	L	XL
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130
Передняя высота (см)	23	23	23	23
Задняя высота (см)	55	55	55	55
Цвет	M1635C = кремовый · M1635H = голубой			

ОПЦИЯ: 9ST012/L дополнительные жесткие шины (38 см)



ОПЦИЯ: PR-70010/20

Lumbopull70


Корсет поясничный (низкий)

ПОКАЗАНИЯ

- Поясничные боли
- Люмбоишалгия и люмбосакралгия, мышечные контрактуры в области поясничного отдела позвоночника
- Спондилоартроз, дископатия в области поясницы
- Легкие травмы в области пояснично крестцового отдела позвоночника
- Послеоперационный период
- Смещение позвонков поясничного отдела
- Лечение переломов поперечных отростков позвоночника

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Двухслойная ткань (внутренний слой из объемной сетки, а внешний из технической ткани): жесткая для обеспечения максимальной плотности, дышащая для максимального комфорта;
- (Эксклюзивная) система последовательных шкивов и ремней для достижения оптимальной стабилизации и максимального натяжения при минимальном усилии: в застегнутом состоянии увеличивает усилие, оказываемое пациентом, и одновременно гарантирует равномерное распределение сил при оптимальной приспособляемости к индивидуальным анатомическим формам;
- Задние нижние ремни (h = 25 мм)
- Задняя эластичная вставка (не конструктивная), чтобы защитить спину от контакта с ремнями и позволить применение различных опционных позиций;
- Анатомический и легкий;
- Широкие участки, покрытые застежками на липучках для возможности максимальной регулировки;
- Усиленные паравертебральные опоры;
- Запаянная передняя накладка с ручками для облегчения надевания;
- Дополнительная опция: жесткая пластина для поясницы и каркас для спины.

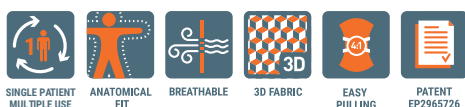

Арт.	M90070				
Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Передняя высота (см)	16	16	16	16	16
Задняя высота (см)	26	26	26	26	26
Цвет	известковый				

Арт.	M90070				
Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Передняя высота (см)	16	16	16	16	16
Задняя высота (см)	26	26	26	26	26
Цвет	известковый				

ОПЦИЯ: M70010 поясничная пластина, низкая, размер 24x23 см
M70020 поясничная пластина, высокая, размер 24x31 см
M90074 Каркас для спины



ОПЦИЯ: M70010/20

Lumbopull72


Корсет поясничный, высокий

ПОКАЗАНИЯ

- Поясничные боли
- Люмбоишалгия и люмбосакралгия, мышечные контрактуры в области поясничного отдела позвоночника
- Спондилоартроз, дископатия в области поясницы
- Легкие травмы в области пояснично крестцового отдела позвоночника
- Послеоперационный период
- Смещение позвонков поясничного отдела
- Лечение переломов поперечных отростков позвоночника
- Поясничный дегенеративный сколиоз
- Спондилolistез с поясничным листезом или без.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Двухслойная ткань (внутренний слой из объемной сетки, а внешний из технической ткани): жесткая для обеспечения максимальной плотности, дышащая для максимального комфорта;
- (Эксклюзивная) система последовательных шкивов и ремней для достижения оптимальной стабилизации и максимального натяжения при минимальном усилии: в застегнутом состоянии увеличивает усилие, оказываемое пациентом, и одновременно гарантирует равномерное распределение сил при оптимальной приспособляемости к индивидуальным анатомическим формам;
- Верхние задние ремни (h = 38 мм)
- Задняя эластичная вставка (не конструктивная), чтобы защитить спину от контакта с ремнями и позволить применение различных опционных позиций;
- Анатомический и легкий;
- Широкая поверхность на липучках для возможности максимальной регулировки;
- Усиленные паравертебральные опоры;
- Запаянная передняя накладка с ручками для облегчения надевания;
- Дополнительная опция: жесткая пластина для поясницы и каркас для спины.

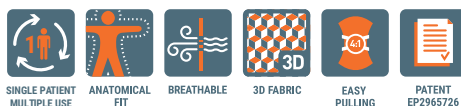

Арт.	M90072				
Размер	S	M	L	XL	
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130	
Передняя высота (см)	20	20	20	20	
Задняя высота (см)	31	31	31	31	
Цвет	известковый				

Арт.	M90072				
Размер	S	M	L	XL	
Обхват таза (см)	70/85	85/100	100/115	115/130	
Передняя высота (см)	20	20	20	20	
Задняя высота (см)	31	31	31	31	
Цвет	известковый				

ОПЦИЯ: M70010 поясничная пластина, низкая, размер 24x23 см
M70020 поясничная пластина, высокая, размер 24x31 см
M90074 Каркас для спины

Арт. **M90070**
ПАТЕНТ: **EP2965726**

Арт. **M90072**
ПАТЕНТ: **EP2965726**



dorsopull74

АРТ. M90074

Корсет груднопоясничный с корректором (к Lumborpull)

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в спине вследствие артрита или кифоза
- Переломы в грудном и/или поясничном отделах позвоночника
- Компрессионный перелом грудного отдела позвоночника вследствие остеопороза и метастазов



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Использовать только с корсетами Lumborpull 70 или 72;
- Включены само моделирующиеся шины;
- Возможность использования при необходимости жесткой моделируемой конструкции из радиопрозрачного алюминиевого сплава;
- Перекрещивающиеся задние лямки, регулируемые по длине, с мягкой подкладкой в области подмышек;
- Набивка из двухслойного вспененного полиэтилена

АРТ.

M90074

Размер

XS

S

M

L

Расстояние T1-L5

35/41

41/47

47/54

54/61

Цвет

известковый



spinalplus 2.0

АРТ. M33049
ПАТЕНТ EP2502608

Корсет груднопоясничный с корректором

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в спине и поясничном отделе позвоночника в период восстановления после стабильных компрессионных переломов пояснично-грудного отдела позвоночника;
- Стабильные компрессионные переломы пояснично-грудного отдела позвоночника вследствие остеопороза или метастатических поражений;
- Гиперкифоз грудного отдела позвоночника, обусловленный травмой либо артрозом межпозвоноковых соединений;
- Ювенильный остеопороз.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Внутренняя моделируемая конструкция в радиолюминесцентном сплаве
- Запатентованная система стяжек
- Абдоминальная фиксация с помощью корсета
- Уникальная система натяжения – регулировка стяжек на спине и плечах посредством натяжения поясов;
- Спинно-брюшные стяжки с ремнем с низким коэффициентом трения;
- Абдоминальный корсет для максимального комфорта и устойчивости:
 - с застежкой-липучкой Velcro®
 - регулировка по длине
 - с эластичной двухкомпонентной вставкой МТР и технической эластичной тканью;
- Эластичная спинная вставка с биодинамическим эффектом;
- Плечевые ремни с набивкой и фиксацией положения;
- Мягкая прокладка из полиэтилена с бархатной лентой и технической тканью; с гладкими швами.



АРТ.	M33049
Размер	
Расстояние T1-L5 (см)	
Обхват таза (см)	
Цвет	серый

XS	S	M	L
35/41	41/47	47/54	54/61
70/125	70/125	70/125	70/125

ОПЦИЯ: M33049/P надувная подушечка



spinalplus

АРТ. MT1049
ПАТЕНТ EP2502608


Корсет груднопоясничный с корректором

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в спине и поясничном отделе позвоночника в период восстановления после стабильных компрессионных переломов пояснично-грудного отдела позвоночника
- Стабильные компрессионные переломы пояснично-грудного отдела позвоночника вследствие остеопороза или метастатических поражений
- Гиперкифоз грудного отдела позвоночника, обусловленный травмой либо артрозом межпозвоноковых соединений
- Ювенильный остеопороз.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Лямки с набивкой в области подмышек;
- Застежка на липучках Velcro®;
- Эластичная вставка с биодинамическим эффектом;
- Моделируемая внутренняя конструкция из радиопрозрачного алюминиевого сплава;
- Спинно-брюшные затяжки с ремнем с низким показателем трения;
- Застежки с самоориентирующейся точкой крепления;
- Изделие представляет собой запатентованный ортез последнего поколения;
- Набивки из двухслойного полиэтилена с велюром и бархатом.

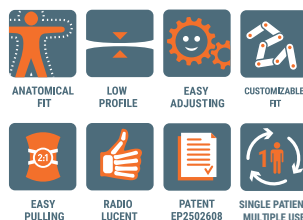

АРТ.	MT1049
Размер	
Расстояние T1-L5 (см)	
Цвет	голубой

XS	S	M	L
35/41	41/47	47/54	54/61

Новинка 2022



e-STAB

Корсет гиперэкстензионный модульный

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника
- Деструктивная остеопороз и остеопороз, деструкция позвонков вследствие вторичного метастазирования;
- Спондилоартрозы в сочетании (или без) со сколиозом
- Хронические пояснично-крестцовые боли
- Замена гипсового корсета



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция:
 - Легкий каркас из алюминиевого сплава без острых краев для дополнительного комфорта.
 - Телескопическая регулировка: не нужно извлекать болты, достаточно их ослабить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.
- Тазовый бандаж:
 - Подвижный
 - Телескопический
 - Зажимы из гибкого и прочного полимерного материала способствуют максимальному прилеганию изделия к туловищу пациента
 - С помощью штифта блокируется угол наклона тазового бандажа на 0°, 18°, 36°
- Возможность регулировки угла наклона в области подмышек с помощью зубчатой застежки с шагом в 7,5°
- Подвижная грудная пластина
- Фиксация:
 - Рычажный механизм крепления с предохранительным замком из прочной и легкой ацеталевой смолы
 - Эксклюзивная система двойного прохода ремня с пряжкой и регулируемого натяжения для предварительной фиксации
- Анатомическая поясничная пластина
- Съемные подкладки фиксируются на кнопках. Изготовлены из пенополиуретана с двойным покрытием из смеси эластана с водоотталкивающей обработкой.

Размер	1	1S	2	2S	3	3S
Обхват груди (см)	50-75	75-105	105-135			
Размер Высота* (см)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

ОПЦИЯ:

REF.IP35/PC/APT. IP35 Connect/
Соединительная пластина
Пластина, соединяющая корсет -
головодержатель и
гиперэкстензионный корсет
REF.IP35/P/APT. IP35/P Нагрудная
пластина для пользователей
кардиостимуляторов
REF.P1000/IA/APT. P1000/IA
Рукав для защиты подмышек из
гипоаллергенного нетоксичного
материала

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

АПТ. MP1000



stabil-T

Корсет гиперэкстензионный модульный

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы, деформации грудных и поясничных позвонков вследствие остеопороза или метастазов (D10-L1/L2)
- Остеопороз;
- Артроз груднопоясничного отдела позвоночника;
- Замена гипсового корсета.



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция с рамочным каркасом из легкого алюминиевого сплава. На металлической конструкции отсутствуют кромки для обеспечения максимального комфорта.
- Боковая регулировка с помощью винтов. Верхняя телескопическая регулировка (не нужно убирать винты).
- Возможность регулировки угла наклона подмышечных шарниров посредством зубчатой системы в соответствии с подмышечными углами (каждые 7,5°)
- Инновационная полимерная пружина для поворота тазового пояса (возможность блокировки под углом 0° и 18° посредством резбовых пальцев).
- Плавающая стерильная пластина.
- Новый широкий ремень с регулировкой длины в три хода. Зажим для фиксации лишней части.
- Система рычажного закрытия из пластика с предохранительной блокировкой.
- Части с набивкой из водоотталкивающего материала, подходящие для погружения в воду: полиэтилен, облитованный нетоксичной искусственной кожей.
- Задняя пластина, которая может быть расположена горизонтально и вертикально

АПТ.	MP1000								
Размер	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Высота (см)*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Цвет	серый								

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

ОПЦИЯ: MIP35/PC Connect, соединительная пластина с головодержателем CerviStable MIP35/P Нагрудная пластина для пользователей кардиостимуляторов Pacemaker MP1000/IA муфта для защиты подмышек из гипоаллергенного нетоксичного материала MP10-S05 моделируемая пластина



modular plus35K

APT. MP35K PLUS

Корсет гиперэкстензионный модульный

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника (T10-L1/L2)
- Деструктивная остеомаляция и остеопороз, деструкция позвонков вследствие вторичного метастазирования; (T10-L1/L2)
- Спондилоартрозы в сочетании (или без) со сколиозом
- Хронические пояснично-крестцовые боли
- Замена гипсового корсета



CUSTOMIZABLE FIT



EASY FASTENING



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкий каркас из алюминиевого сплава без острых краев для дополнительного комфорта
- Подвижная грудная пластина
- Поясничная пластина с возможностью расположения как вертикально, так и горизонтально
- Регулировка с помощью винтиков
- Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом (с помощью штифта блокируется угол наклона тазового бандажа на 0° или 18°)
- Рычажный механизм из пластика с предохранителем блокировки
- Новый ремень с застегиванием на крючок и двойным проходом для регулировки длины
- Муфта для защиты подмышек из гипоаллергенного нетоксичного материала

APT.

Размер

Обхват талии (см)

Высота гиперэкстензора* (см)

Цвет

MP35K Plus

XS

S

MS

M

ML

LS

L

XLS

XL

50/60

60/75

75/90

75/90

75/90

90/105

90/105

105/115

105/115

30/37

34/42

34/41

36/46

40/52

36/46

40/52

39/49

42/54

белый

* от верхнего края грудины (ямная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

ОПЦИЯ: M35/4M Моделируемая поясничная пластина
MP35/P Нагрудная пластина для пользователей кардиостимуляторов PaceMaker
MP35/PC Connect, соединительная пластина к головодержателю CerviStable



modular plus35acqua

APT. MP35A PLUS

Корсет гиперэкстензионный модульный

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника (T10-L1/L2)
- Деструктивная остеомаляция и остеопороз, деструкция позвонков вследствие вторичного метастазирования; (T10-L1/L2)
- Спондилоартрозы в сочетании (или без) со сколиозом • Хронические пояснично-крестцовые боли
- Замена гипсового корсета



CUSTOMIZABLE FIT



EASY FASTENING



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкий каркас из алюминиевого сплава без острых краев для дополнительного комфорта
- Подвижная грудная пластина
- Поясничная пластина с возможностью расположения как вертикально, так и горизонтально
- Регулировка с помощью винтиков
- Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом (с помощью штифта блокируется угол наклона тазового бандажа на 0° или 18°)
- Рычажный механизм из пластика с предохранителем блокировки
- Новый ремень с застегиванием на крючок и двойным проходом для регулировки длины
- Муфта для защиты подмышек и гипоаллергенного нетоксичного материала

APT.

Размер

Обхват талии (см)

Высота гиперэкстензора* (см)

Цвет

MP35A PLUS

S

MS

M

ML

LS

L

XLS

XL

60/75

75/90

75/90

75/90

90/105

90/105

105/115

105/115

30/37

34/42

36/46

40/52

36/46

40/52

39/49

42/54

белый

* от верхнего края грудины (ямная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

ОПЦИЯ: M35/4M Моделируемая поясничная пластина
MP35/P Нагрудная пластина для пользователей кардиостимуляторов PaceMaker
MP35/PC Connect, соединительная пластина к головодержателю CerviStable



modular plus45

APT. MP45K PLUS


Корсет гиперэкстензионный модульный

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника (T10-L1/L2)
- Деструктивная остеопороз и остеопороз, деструкция позвонков вследствие вторичного метастазирования; (T10-L1/L2)
- Спондилоартрозы в сочетании (или без) со сколиозом
- Хронические пояснично-крестцовые боли
- Замена гипсового корсета

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкий каркас из алюминиевого сплава без острых краев для дополнительного комфорта
- Подвижная грудная пластина
- Поясничная пластина с возможностью расположения как вертикально, так и горизонтально
- Регулировка с помощью винтиков
- Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом (с помощью штифта блокируется угол наклона тазового бандажа на 0° или 18°)
- Рычажный механизм из пластика с предохранителем блокировки
- Новый ремень с застегиванием на крючок и двойным проходом для регулировки длины
- Муфта для защиты подмышек и гипоаллергенного нетоксичного материала

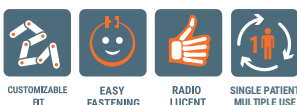

АПТ.	MP45K Plus							
Размер	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Обхват талии (см)	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Высота гиперэкстензора* (см)	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Цвет	белый							

* от верхнего края грудины (ямная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

ОПЦИЯ: M35/4M Моделируемая поясничная пластина
MIP35/P Нагрудная пластина для пользователей кардиостимуляторов PaceMaker
MIP35/PC Connect, соединительная пластина к головодержателю CerviStable



connect

APT. MIP35/PC

Соединительная пластина между головодержателем Cervistable и гиперэкстензором Modular plus, Stabil-T

ПОКАЗАНИЯ

- Использовать при сочетанных патологиях на уровне шейных позвонков и грудного отдела позвоночника

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Алюминиевая пластина прямоугольной формы
- Соединяет грудную пластину гиперэкстензора (Modular Plus или Iper35) с передней жесткой планкой головодержателя
- Подходит для всех гиперэкстензоров Orthoservice Ro+Ten



АПТ.	MIP35/PC
Размер	универсальный



nhyco

АПТ. MD100

Корсет крестообразный

ПОКАЗАНИЯ

- Растяжение и иммобилизация груднопоясничного отдела позвоночника
- Послеоперационное лечение
- Гиперкифоз и искривление позвоночника
- Болезнь Шейерманна - Мау
- Проседания позвонков вследствие остеопороза
- Проседания позвонков вследствие вторичных метастатических поражений



CUSTOMIZABLE FIT



EASY FASTENING



RADIO LUCENT



WATERPROOF



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из легкого алюминиевого сплава Т6 (вес меньше 700 грамм)
- Раздвижные грудинный и лобковый пелоты (подушечки)
- Поясничная пластина трех размеров: малая (горизонтальная) - стандартная - длинная
- Набивка из „ЭВА“, непромокаемого и нетоксичного материала, не содержащего латекса. При необходимости, может быть заменена
- Новый замок PLUS из прочного и легкого композитного материала. Удобный для открытия и закрытия, гарантирует постоянный нажим в поясничной области. Имеет предохранительную блокировку
- Регулируемые скользящие стержни, без необходимости отвинчивания винтов

АПТ.

Размер

Расстояние от грудины до лобка (см)

Максимальный обхват талии (см)

Цвет

MD100

S

R

L

27/34

34/41


40/53

90

120

120

белый

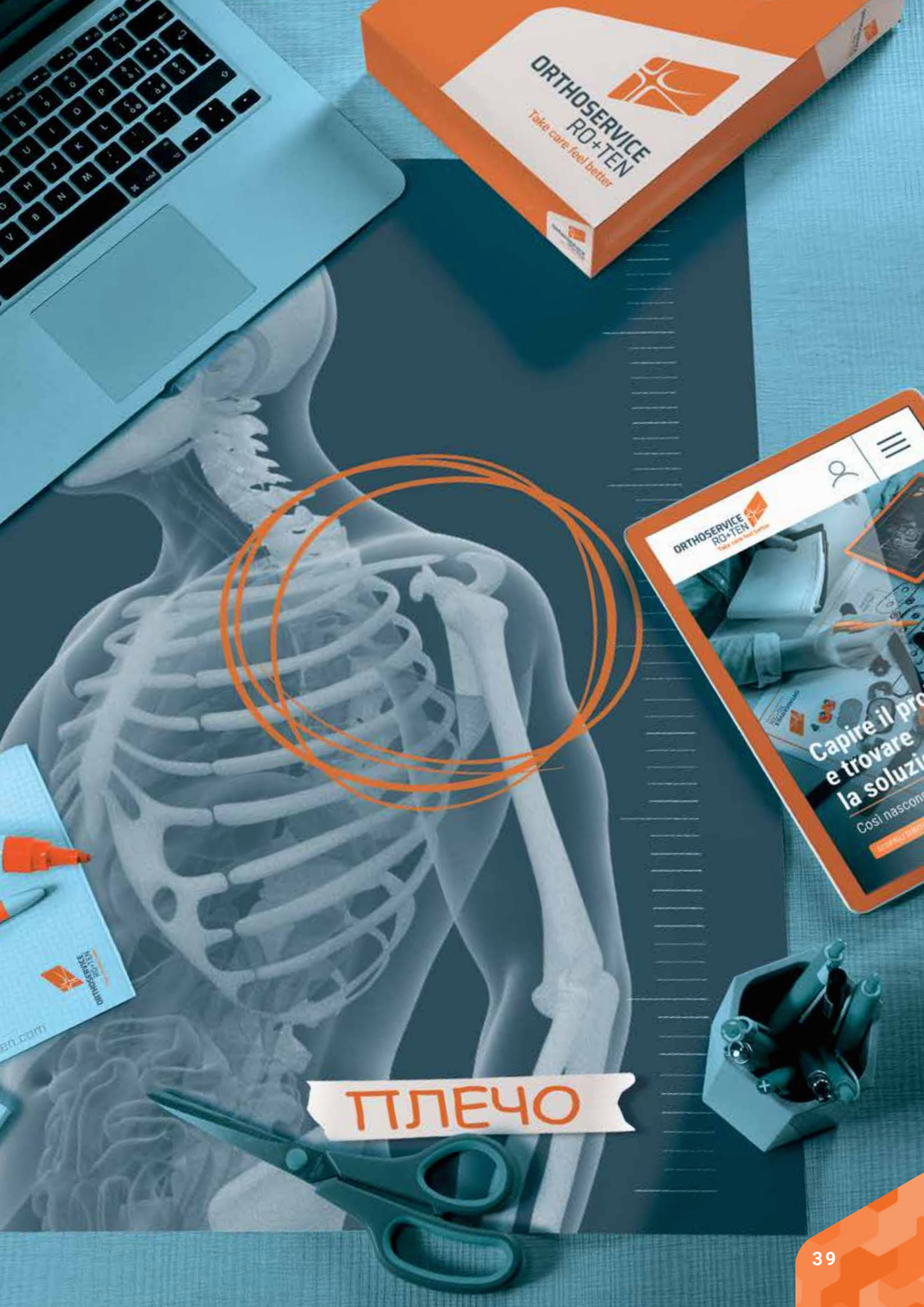

ПЛЕЧО

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

Capire il pro
e trovare
la soluzi
Così nascon



shouldercross

АПТ. M20726 R/L


Ортез для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение при передней и задней нестабильности после вывиха в плечевом суставе
- Защита при занятиях спортом или на работе в условиях риска, в ожидании или после операции по стабилизации плечевого сустава.
- Полезно при реабилитационном лечении болезненной гипермобильности плечевых суставов или при их функциональной нестабильности.
- Использовать после оперативного вмешательства или при консервативном лечении серьезных повреждений плечевого сустава.
- Полезен при восстановительной терапии дискинезии лопаток.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция ортеза выполнена из ткани BreathSkill:
 - мягкая и дышащая
 - 3D текстура
 - внешнее покрытие из специальной сетчатой вязки для придания большей прочности
- Скрещивающиеся усиливающие резиновые ленты для наилучшей стабилизации суставов.
- Контралатеральный фиксирующий ремень, регулируемый по размеру, с упругой и мягкой (с набивкой) подмышечной частью.
- Захват руки, регулируется с помощью эластичной застежки на липучке Velcro®

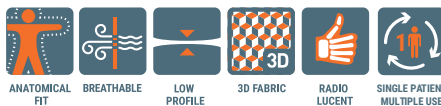

АПТ.	M20726 R/L			
Размер	S	M	L	XL
Обхват бицепса (см)	22/26	26/30	30/35	35/40
Цвет	серый			

Левый/правый

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ



octofix (cvb)

АПТ. M8503

Ортез-тутор иммобилизирующий для ключицы и предплечья

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы ключицы
- Неполный вывих акромиально-ключичного сустава

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ворсистая ткань с набивкой
- Система надевания как у восьмиобразной повязки с задней застежкой на липучках Velcro®



АПТ.	M8503					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват груди (см)	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120	120/135
Цвет	белый					






acromion 2.0

АРТ. MS1063 R/L
ПАТЕНТ EP2591757

Ортез-тutor иммобилизирующий для ключицы и предплечья

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение для акромиально-ключичного сустава после травматического вывиха 1°, 2° и 3° типа (по усмотрению врача)
- Консервативное лечение после перелома дистального конца ключицы

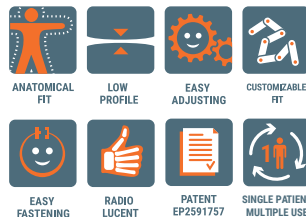

АРТ.	MS1063 R · MS1063 L
Размер	универсальный
Цвет	голубой

Левый/правый

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Контралатеральный фиксирующий ремень с быстро застегивающейся расстегивающейся пряжкой (оранжевого цвета);
- Передние затяжки с постоянным и предварительно регулируемым натяжением;
- Регулируемая и полужесткая опора для локтя и предплечья с набивкой из вспененного полиэтилена; полужесткая для облегчения надевания;
- Ремни из велюра, которые можно отрезать по размеру;
- Анатомический ключичный наплечник, гибкий, с набивкой из вспененного полиэтилена и поворотными шарнирами;
- Система ремней и затяжек, разработанная для смещения ключицы вниз, а плечевой кости - вверх, что способствует выправлению акромиона и ключицы (эксклюзивная система);
- Поясничный ремень.



shouldfix

АРТ. M8409

Ортез-иммобилизационная повязка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Сложные переломы плечевой кости
- Вывихи плечевых суставов
- Растяжения плеча
- Послеоперационное лечение переломов плечевой кости и вывихов плечевого сустава
- Послеоперационное лечение тенорафии на длинной головке плечевого бицепса

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция для поддержки руки из поликоттона
- Фиксирующая лента из мягкой ткани с набивкой
- Оттяжки вокруг плеча с застежками на липучках
- Локтевой карман



АРТ.	M8409
Размер	универсальный
Цвет	серый

Двусторонний



shouldfix II

АПТ. M8412

Ортез-иммобилизационная повязка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Закрытые переломы плечевой кости
- Вывихи плеча
- Растяжение связок плеча
- Послеоперационное лечение переломов плечевой кости и операций в связи с вывихом плеча
- Послеоперационное лечение тенорафии длинной головки двуглавой мышцы плеча



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Сумка для поддержки руки из стеганой ткани на липучке для максимального диапазона регулировки
- Мягкие бретели с застежками на липучках
- Эксклюзивный хомут для блокировки локтя из сетчатой ткани
- Утягивающая лента из стеганой ткани на липучке для максимального диапазона регулировки

АПТ.

Размер

Цвет

M8412

универсальный

черный

Двусторонний



shouldfix open (sfb)

АПТ. M8410

Ортез-иммобилизационная повязка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Сложные переломы плечевой кости
- Вывихи плечевых суставов
- Растяжения плеча
- Послеоперационное лечение переломов плечевой кости и вывихов плечевого сустава
- Послеоперационное лечение тенорафии на длинной головке плечевого бицепса



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из мягких материалов, связанная с наружной частью из ворсистого нейлона для застежки на липучках Velcro®
- Оттяжка вокруг плеча с защелкиваемой застежкой

АПТ.

Размер

Обхват талии (см)

Цвет

M8410

Regular

Large

<120

>120

черный

Двусторонний



shouldfix 3

АПТ. M20414

Ортез-иммобилизационная повязка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Закрытые переломы плечевой кости
- Вывихи плеча
- Растяжение связок плеча
- Послеоперационное лечение переломов плечевой кости и операций в связи с вывихом плеча
- Послеоперационное лечение тенорафии длинной головки двуглавой мышцы плеча

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из хлопка и полиэстера предназначена для фиксации руки и имеет локтевой карман
- Фиксирующая нагрудная оттяжка с застежкой на липучках Velcro® и набивкой в центральной части
- Фиксирующая плечевая оттяжка с застежкой на липучках Velcro® и набивкой в центральной части



АПТ.	M20414			
Размер	S	M	L	XL
Длина предплечья* (см)	28/34	34/42	42/48	48/58
Цвет	черный			

*расстояние от локтя до края зажатого кулака
Двусторонний



top-S 10°/15°

АПТ. ME110 10°
ME210 15°

Ортез-абдукционная поддержка для плеча с углом фиксации в 10/15 градусов

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационная терапия (абдукция) вследствие восстановления колпачка вращательных суставов, наложения швов на суставную губу, капсульной стабилизации, восстановления мягких тканей

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура из высокоплотного пенополиуретана с тканевым покрытием из серебристого волокна, область для опоры руки для максимального комфорта
- Муфта для защиты шеи
- Покрытие и муфты из ворсистого нейлона с внешней стороны для креплений Velcro®
- Карман для поддержки руки из дышащего материала
- Ремни с креплением на застежках и регулируемые при помощи Velcro®
- Опорный ремешок для большого пальца



АПТ.	ME110 10° · ME210 15°		
Размер	S	M	L
Длина предплечья* (см)	< 34	35/39	> 40
Цвет	черный		

*расстояние от локтя до края зажатого кулака
Двусторонний





top II-S 10°/15°

АПТ. ME111 10°
ME211 15°

Ортез-абдукционная поддержка для плеча с углом фиксации в 10/15 градусов

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационная терапия (абдукция) вследствие восстановления колпачка вращательных суставов, наложения швов на суставную губу, капсульной стабилизации, восстановления мягких тканей

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура из высокоплотного пенополиуретана с тканевым покрытием из серебристого волокна, область для опоры руки для максимального комфорта
- Муфта для защиты шеи
- Покрытие и муфты из ворсистого нейлона с внешней стороны для креплений Velcro®
- Карман для поддержки руки из дышащего материала
- Ремни с креплением на застежках и регулируемые при помощи Velcro®
- Опорный ремешок для большого пальца



3D FABRIC




SILVER FIBER



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

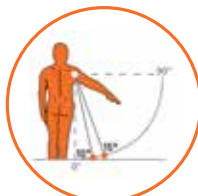

АПТ.

Размер

Длина предплечья* (см)

Цвет

ME111 10° · ME211 15°

S

< 38

L

> 39

черный

*расстояние от локтя до края зажатого кулака
Двусторонний



extra-S 15°/30°

АПТ. ME113 15° R
ME115 30° R
АПТ. ME114 15° L
ME116 30° L

Ортез-абдукционная поддержка для плеча с углом фиксации 15/30 градусов

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационное лечение после оперативного вмешательства
 - капсульная стабилизация,
 - восстановление мягких тканей
- Консервативное лечение при вывихе.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура из вспененного пенополиуретана высокой плотности покрытый тканью с серебряными нитями в части, соприкасающейся с кожей
- Специальная подушечка для защиты кожи в области шеи
- Само изделие и подушечка с внешней стороны имеют нейлоновое покрытие для фиксации липучек Velcro®
- Ленты с креплением на пряжках и регулируемые липучками
- Возможность наружного вращения 15° или 30°
- Реабилитационный мяч
- Поддержка большого пальца
- Карман для поддержки из дышащего материала руки



3D FABRIC



SILVER FIBER



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



АПТ. правый

АПТ. левый

Размер

Длина предплечья* (см)

Цвет

ME113 15° R - ME115 30° R

ME114 15° L - ME116 30° L

S

< 34

M

35/39

L

> 40

черный

*расстояние от локтя до края зажатого кулака
Левый/правый



softab 20°

АРТ. M84502

Ортез-абдукционная подушка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационное лечение после восстановления вращательной манжеты плеча;
- Повреждения нервов.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция подушки из высокоплотного пенополиуретана;
- Обивка, поясничный ремень и манжеты из многослойной ткани с нейлоном, ворсистой поверхностью снаружи для застежки на липучках Velcro®;
- Ремень через плечо с креплением на липучках Velcro®;
- Абдукционная установка под углом 15°–20°.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АРТ.

M84502

Размер

универсальный

Цвет

черный

Двусторонний



ОПЦИЯ: M84500/A

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: M84500/A - Стержень для поддержки запястья и руки



softab 45°/70°

АРТ. M84500

Ортез - абдукционная подушка для плеча

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы плечевой кости с минимальным смещением
- Уход и лечение адгезивного капсулита плечевого сустава после мобилизации
- Послеоперационное лечение и уход после эндо и артропротезирования плеча
- Лечение и послеоперационный уход после восстановления головки плеча
- Повреждение нервов

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура подушки из микропористого резинового материала высокой плотности
- Чехол, ремень и манжеты из двойной ткани с наружной нейлоновой марлей для застежки на липучках Velcro®
- Затяжка вокруг плеча с фиксацией на липучках Velcro®
- Возможность отведения плеча на 45° или 70°
- Защитная муфта для шеи.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АРТ.

M84500


Размер

Универсальный

Цвет

черный


Двусторонний

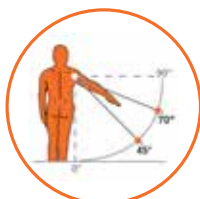

ОПЦИЯ: M84500/A

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: M84500/A - Стержень для поддержки запястья и руки



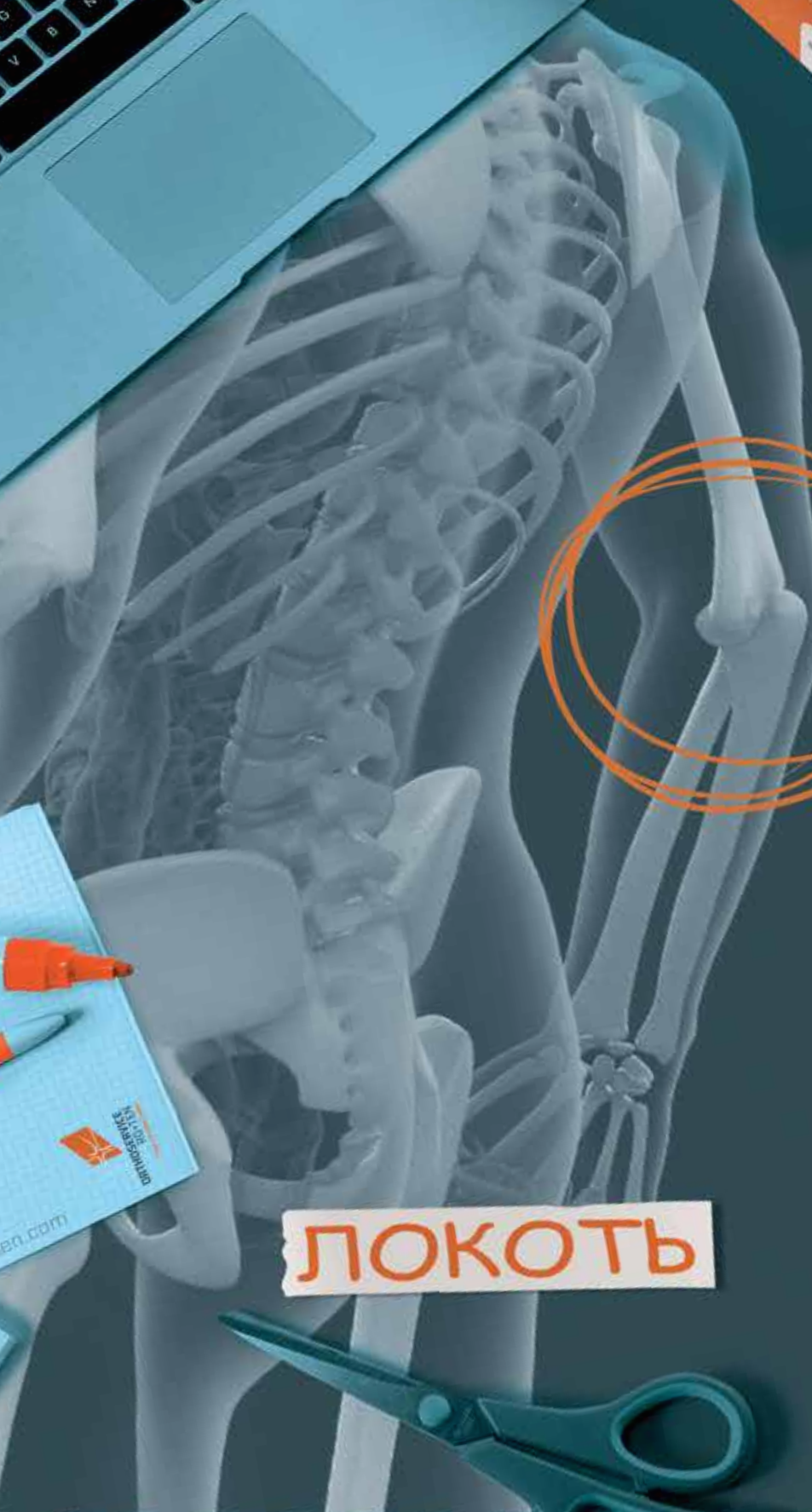

ЛОКОТЬ





epilastik 32

Арт. M90132

Ортез-шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Эпикондилит эпипитрохлеит локтевого сустава;
- Хронические боли при бурсите или тендините.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Анатомический дизайн и трикотажная ткань с трехмерной текстурой
- Силиконовые вставки для надмыщелка плечевой кости предназначены для облегчения нагрузки и выполняют обезболивающую функцию.
- Микросиликоновая трубка для большей мягкости и прочности при натяжении.



Арт.

Размер

Обхват предплечья на уровне 13 см от локтя (см)

Цвет

M90132

0	1	2	3	4	5	6
17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31

синий

Двусторонний



episkill 32

Арт. M33132


Ортез -шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Эпикондилит и эпипитрохлеит локтя;
- Хронические боли от бурсита или тендинита

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
 - дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- CompresSkill
 - Эластичная компрессионная мультифибра;
 - Сверхтонкий профиль, способствующий безболезненному сгибанию локтя;
 - Максимальная адаптируемость;
 - Превосходное прилегание к суставу.
- Ремешок на липучках Velcro нейлоновой петлей для увеличения давления на предплечье.

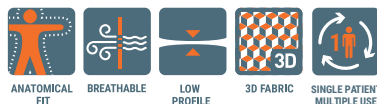

Арт.

Размер

Обхват предплечья на уровне 13 см от локтя (см)

Цвет

M33132

XS	S	M	L	XL
20/23	23/25	25/30	30/35	35/40

серый

Двусторонний



ePiFIT 32

АПТ. MB1132


Ортез-шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Эпикондилиты и локоть гольфиста
- Хронические боли, вызванные бурситом или тендинитом

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из дышащей ткани AirX™
- Вставка из Soft-X для большего комфорта
- Ремешок с текстильной застежкой на липучках Velcro® и нейлоновой шлевкой

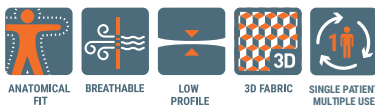

АПТ. Размер Обхват предплечья на уровне 13 см от локтя (см) Цвет	MB1132				
	XS	S	M	L	XL
	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
	черный				

Двусторонний



ОПЦИЯ: MB1018

elbo 2.0

АПТ. MB1017 R/L


Ортез-шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Сложные переломы локтевого сустава
- фиксация после операций при переломах, после шва сухожилия длинной головки бицепса и связок
- Вывихи и хронические травмы локтевого сустава

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Телескопический боковой шарнирный стержень из легкого алюминиевого сплава.
- Телескопическая регулировка длины с помощью простых кнопок, имеющих на лонгетах
- Шарнирное соединение из поликарбоната; система, препятствующая случайному разблокированию
 1. Регулируемое разгибание под углом 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 2. Регулируемое сгибание под углом 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- Лонгеты из технополимера с регулируемыми по длине ремешками
- Термоформованная набивка из двухслойного мультипрема (MTP)
- Регулируемый по длине плечевой ремень с мягкой подкладкой для защиты плеча

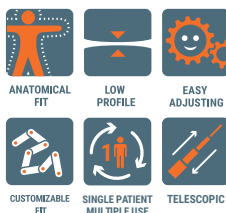

Поддержка руки для Elbo 2.0

АПТ.	MB1018 R/L
Размер	Универсальный
Цвет	черный

Левый/правый

АПТ.	MB1017 Elbo 2.0 R/L
Размер	Универсальный
Цвет	черный

Левый/правый

ОПЦИЯ: MB1018 Поддержка руки для Elbo 2.0 (Левый/правый)



elbo

Арт. MB1014 R/L

Ортез-шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Сложные переломы локтевого сустава
- фиксация после операций при переломах, после шва сухожилия длинной головки бицепса и связок
- Вывихи и хронические травмы локтевого сустава

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Регулируемое положение захвата руки и предплечья;
- Внутренняя часть из пластика (полиэтилен), которая повторяет анатомические формы пациента: двухслойная набивка из мультипрема;
- Ткань, контактирующая с телом, соткана с использованием серебряного волокна, антибактериальная и с противозапаховым эффектом;
- Плечевой ремень;
- Боковой сочлененный стержень из легкого алюминиевого сплава и стальное шарнирное соединение;
- Регулируемое разгибание от 0° до 90° с шагом 10°
- Регулируемое сгибание от 0° до 120° с шагом 10°;
- Возможность блокировки сустава под углом от 0° до 90° сгибания каждые 10°



ANATOMICAL FIT

LOW PROFILE

EASY ADJUSTING

CUSTOMIZABLE FIT

SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



Арт.

Размер

Макс. обхват плеча (см)

Макс. обхват предплечья (см)

Цвет

MB1014 R / MB1014 L

S

20/28

20/27

L

28/40

25/35

черный-белый

Левый/правый

Арт. MB1015



elbo OPTION

Поддержка руки в нейтральном положении

Арт.

Размер

MB1015

универсальный



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

Арт. MB1016



elbo OPTION

Поддержка для руки в положении пронации/супинации

Арт.


Размер

MB1016

универсальный



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

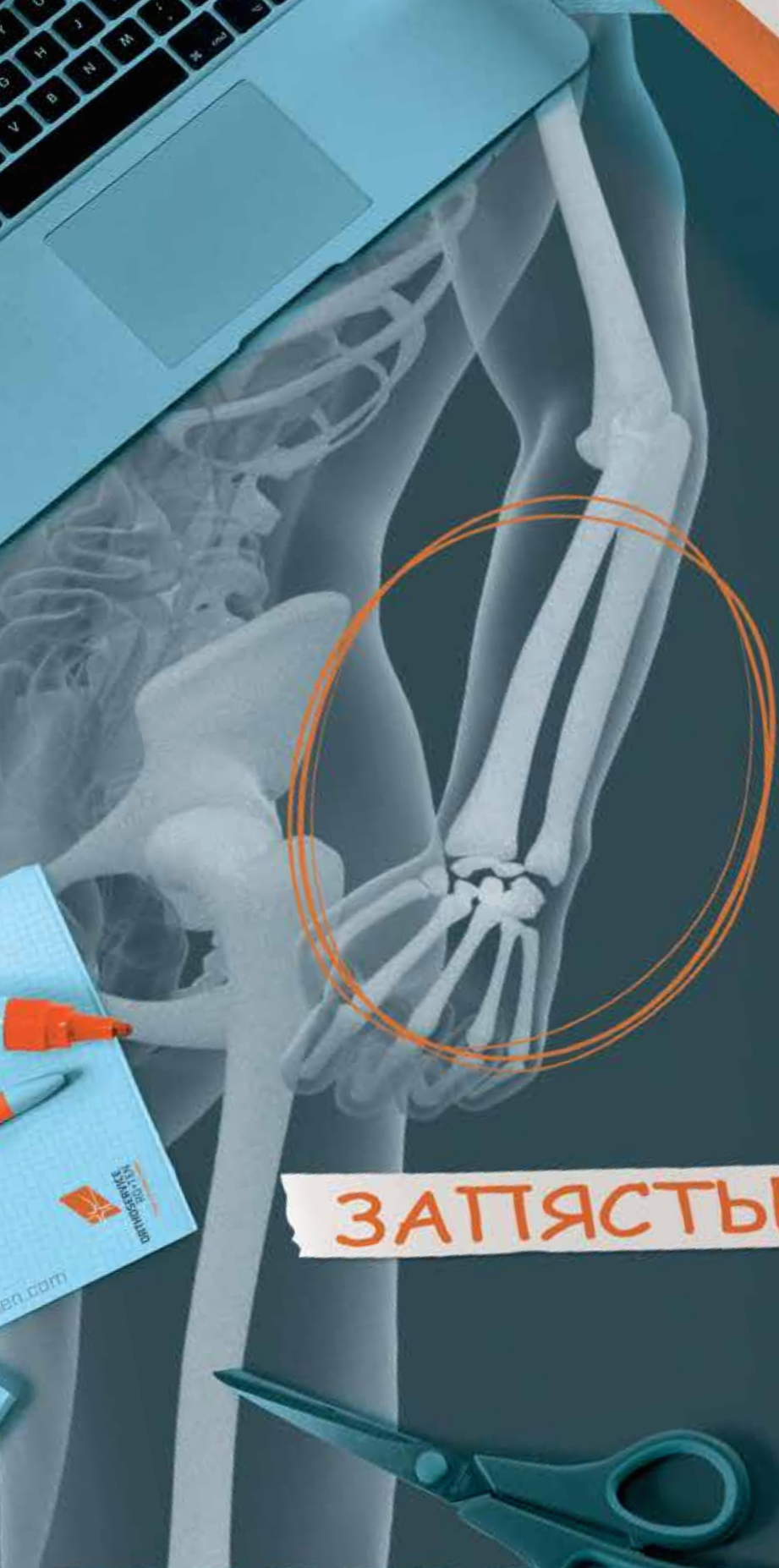

ЗАПЯСТЬЕ





sling-up 2.0

АПТ. M8404

Ортез-шина для поддержки руки

ПОКАЗАНИЯ

- Помощь в поддержке предплечья и запястья
- Полезен в качестве поддержки в случае зафиксированной конечности
- Полезен в случае необходимости отдыха для акромиально ключичного сустава (после подвывиха I-II степени) или плечевого сустава
- Полезен в случае необходимости иммобилизации верхней конечности с согнутым локтем

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ткань из хлопковой смеси
- Лента вокруг плеча с набивкой из полиуретановой пены и велюровым покрытием
- Практичная затяжка на липучках для индивидуально регулируемой степени поддержки



BREATHABLE



EASY FASTENING



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

АПТ.

Размер

Длина кармана (см)

Цвет

M8404

S

34

M

42

L

48

XL

58

черный

Двусторонний



manulastik 19

APT. M90119 R/L

Ортез для кисти и запястья

ПОКАЗАНИЯ

- Травма кисти руки и запястья
- Тендинит запястья
- Артрит и артроз запястного сустава
- Последствия переломов запястья
- Послеоперационное лечение запястья.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Отверстие для большого пальца
- Ладонная шина из полимерного материала
- Ремешок с застежкой на липучке Velcro
- Силиконовая вставка создает дополнительный комфорт
- Микросиликоновая трубка для большей мягкости и прочности при натяжении.



APT.	M90119 R/L						
Размер	0	1	2	3	4	5	6
Обхват запястья (см)	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Цвет	синий						

Левый/правый



manulite

APT. M90100

Ортез для кисти и запястья

ПОКАЗАНИЯ

- Вывихи запястья;
- Закрытые переломы концов лучевой и локтевой костей;
- Тендинит запястья;
- Артrosis и артриты;
- Остаточные явления после переломов запястья или преждевременного снятия гипса.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Полностью цельная конструкция без швов;
- Низкий профиль;
- Конструкция:
 - с наружной стороны: нерастяжимый легкий велюр;
 - набивка: из мультипрема с шинами;
 - с внутренней стороны (в контакте с кожей): мягкий на ощупь материал (безвредный для кожи, комфортный, дышащий, нераспускаемый и антистатический);
- Отверстие для большого пальца руки с краями, обрамленными мягким на ощупь материалом для большего комфорта;
- Жесткая шина для ладони из алюминия, заданной формы, моделируемая по назначению врача;
- Усиливающие тыльные спиральные шины;
- Застегивание с помощью пряжек и ремней на липучках Velcro®;
- Плотная застежка на липучках Micro-Velcro® для укорачивания ручного ремешка.



APT.	M90100		
Размер	S	M	L
Обхват запястья (см)	13/18	18/23	23/28
Длина (см)	21	21	21
Цвет	черный		

Двусторонний





polFIT 19

APT. MP1119 R/L

Ортез для кисти и запястья, короткий, разъемный, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Вывихи запястья;
- Закрытые переломы конца лучевой и локтевой кости;
- Тендинит запястья;
- Артрозы и артриты;
- Остаточные явления после переломов запястья или после преждевременного снятия гипса.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из дышащей 3D-ткани;
- Усиливающие пластиковые шины для тыльной стороны ладони;
- Застегивание с помощью пряжек и ремней на липучках Velcro®.
- Жесткая шина для ладони из алюминия, заданной формы, моделируемая по назначению врача.



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY FASTENING



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

APT.

Размер

Обхват запястья (см)

Длина (см)

Цвет

MP1119 R · MP1119 L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
20	20	20	20

черный

Левый/правый



polFIT 17

APT. MP1117 R/L

Ортез для кисти и запястья, разъемный, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Вывихи запястья;
- Тендинит запястья;
- Артрозы и артриты;
- Остаточные явления после переломов запястья или преждевременного снятия гипса;
- Артроз трапецио-пястного и пястно-фалангового сустава большого пальца руки;
- Повреждение фасции локтевой области пястно-фалангового сустава большого пальца руки

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из дышащей 3D-ткани;
- Усиливающие пластиковые шины для тыльной стороны ладони;
- Застегивание с помощью пряжек и ремней на липучках Velcro®.
- Жесткая алюминиевая шина для большого пальца, заданной формы, моделируемая по назначению врача
- Жесткая шина для ладони из алюминия, заданной формы, моделируемая по назначению врача.



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY FASTENING



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

APT.

Размер

Обхват запястья (см)

Длина (см)

Цвет

MP1117 R · MP1117 L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
20	20	20	20

черный

Левый/правый



polFIT 21

APT. MP1121 R/L

Ортез для кисти и запястья, длинный, разъемный, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Лечение закрытых переломов дистального метаэпифиза лучевой и локтевой кости, которые врач-ортопед посчитает стабильными;
- Послеоперационное лечение нестабильных переломов дистальных отделов лучевой и локтевой кости;
- Вывихи запястья;
- Тендиниты;
- Переломы костей запястья (за исключением ладьевидной кости), которые лечатся как хирургическим, так и консервативным путем;

- Осложнения ревматоидных артритов;
- Послеоперационное лечение переломов метакарпальных костей;
- Артроз лучезапястных суставов

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Полное расстегивание с тыльной стороны;
- Конструкция из дышащей 3D-ткани;
- Застегивание с помощью четырех колец и ремешков на липучках Velcro®;
- Усиливающие пластиковые шины для тыльной стороны ладони;
- Жесткая шина для ладони из алюминия, заданной формы, моделируемая по назначению врача.



APT.

Размер

Обхват запястья (см)

Длина (см)

Цвет

MP1121 R · MP1121 L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
26	26	26	26

черный

Левый/правый



Новинка 2022

polFIT 22

APT. MP1122 R/L

Ортез для кисти и запястья, длинный, разъемный, с жесткими моделируемыми пластинами

ПОКАЗАНИЯ

- Сложный перелом первой пястной кости.
- Растяжение локтевой коллатеральной связки пястной кости большого пальца фаланги.
- Подозрение на перелом ладьевидной кости.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Жесткая алюминиевая шина для большого пальца, заданной формы, моделируемая по назначению врача
- Жесткая ладонная шина из алюминия, заданной формы, моделируемая по назначению врача;
- Конструкция из дышащей 3D-ткани;
- Усиливающие пластиковые шины для тыльной стороны ладони;
- Застегивание с помощью пряжек и ремней на липучках Velcro®.



APT.

Размер

Обхват запястья (см)

Длина (см)

Цвет

MP1122 R · MP1122 L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
26	26	26	26

черный

Левый/правый



carpo 41

АПТ. MP1341 R/L

Ортез для кисти и запястья, моделируемый

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное и послеоперационное лечение дистальных метаэпифизарных переломов предплечья, переломов костей запястья (не ладьевидной кости), переломов пястных костей;
- Остаточные явления после указанных выше переломов;
- Тендиниты запястья и кисти;
- Остаточные явления после тенорафии сгибающих/разгибающих сухожилий пальцев;
- Артроз лучезапястных суставов;
- Неврологический дефицит с соответствующим параличом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Моделируемая конструкция, состоящая из двух металлических элементов с различной жесткостью;
- Часть ткани, контактирующая с кожей изготовлена с применением серебряных волокон;
- Застегивание при помощи ремешков с текстильными застежками Velcro®



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АПТ.

Размер


Ширина ладони руки (см)
(пястная кость)

Длина ортеза (см)

Цвет

MP1341 R · MP1341 L

S	M	L
5,5/7	7/8,5	8,5/10
30	34	37
голубой		

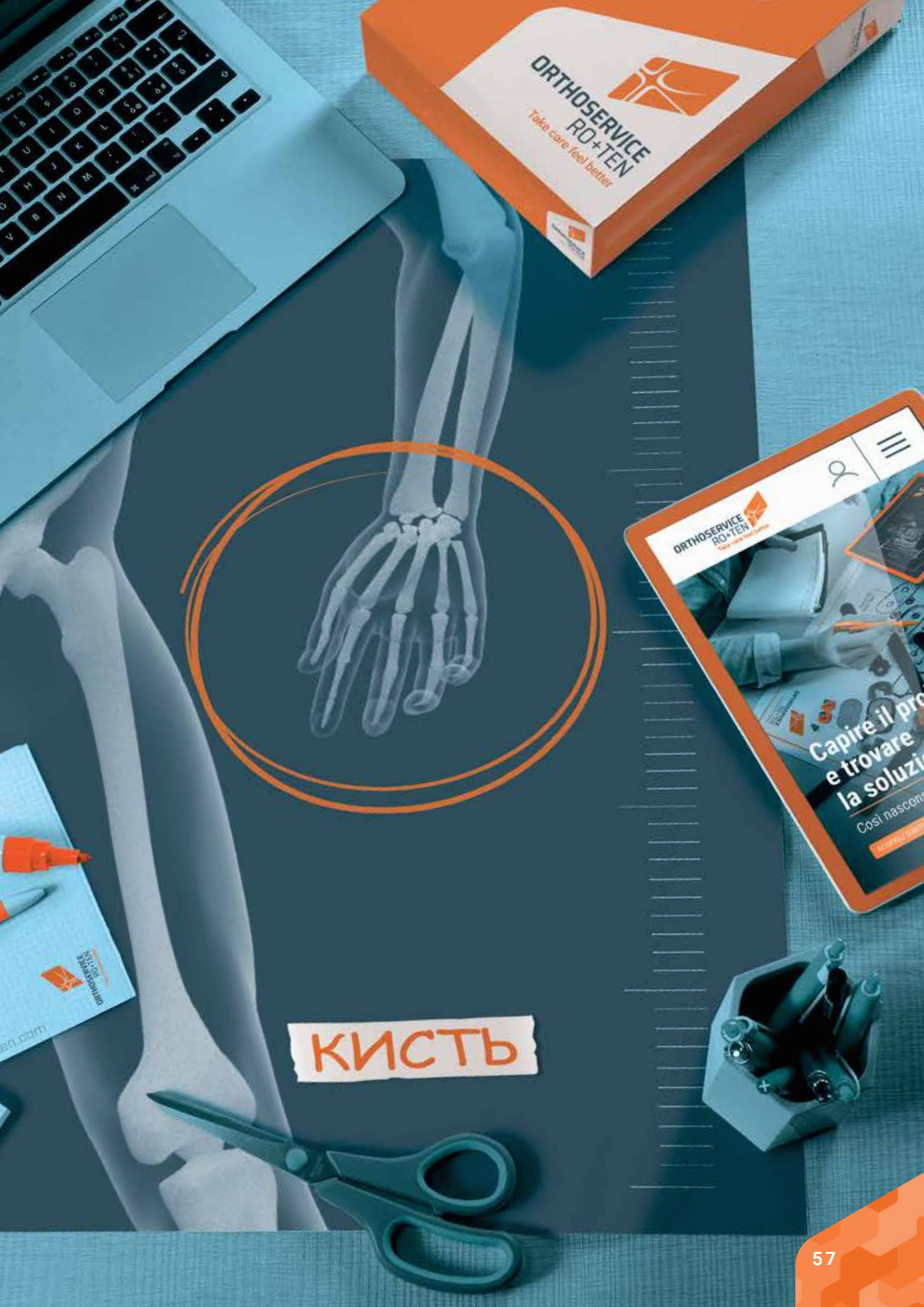

КИСТЬ



daumfix

АПТ. M5006 R/L

Ортез для большого пальца

ПОКАЗАНИЯ

- Ризартроз
- Тендинит большого пальца руки
- Тендинит де Кервена
- Дисторсия пястных костей-фаланг
- Повреждение Штайнера
- Остаточные явления после перелома Беннета
- Остаточные явления после пластики трапециевидной кости и хирургии пальца

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из полированного и галтованного полипропилена
- Застегивающий ремешок на запястье с эластичной застежкой на липучках
- В комплекте защитная перчатка из эластичной хлопковой ткани, для использования перед надеванием ортеза
- Термоформуемый



АПТ.	M5006 R - M5006 L			
Размер	S	M	L	XL
Обхват запястья (см)	13/17	17/19	19/23	23/28
Цвет	бежевый			

Левый/правый



stax

АРТ. M2001

Орtez „STAX“ для одного пальца

ПОКАЗАНИЯ

- Повреждение сухожилий
- Перелом крайней фаланги
- Конфузия ногтя
- Послеоперационное восстановление поврежденных сухожилий

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Изделие изготовлено из пластмассы и имеет отверстия для вентиляции



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АРТ.


Таблица размеров
(см. рисунок сбоку)

Цвет

M2001

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 1/2 - 6 - 7

прозрачный

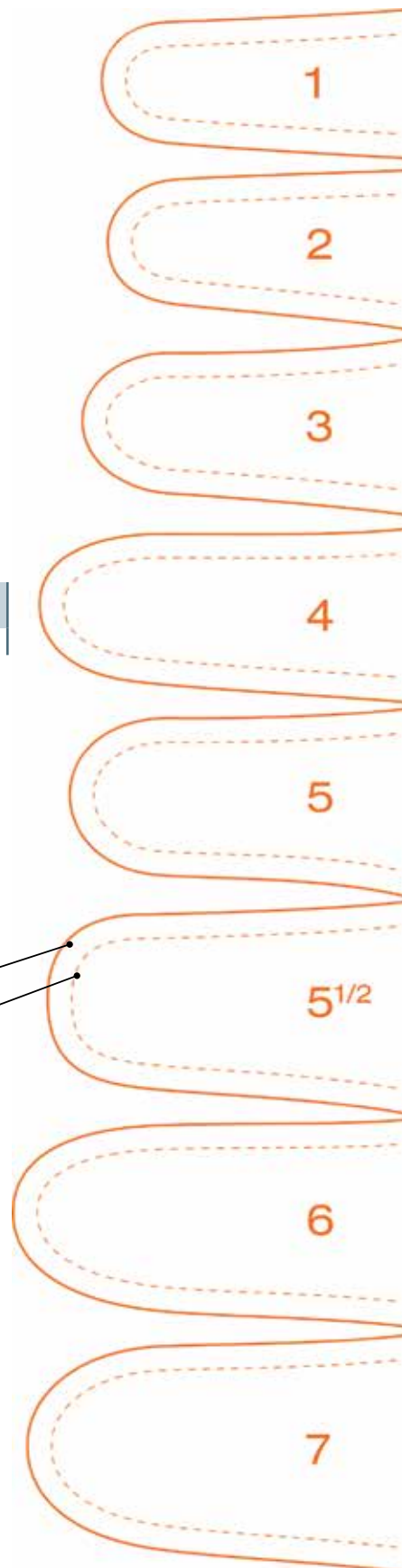

Внешний край

Измерение изнутри






ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

Capire il problema
e trovare la soluzione.
Così nascono
le migliori soluzioni.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ
СУСТАВ

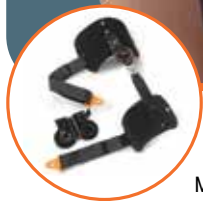

M91007


hipocross

АПТ. M91006 R/L - M91007 R/L
ПАТЕНТ EP3202376 - US10548758

Орtez на тазобедренный сустав „HIPO“

ПОКАЗАНИЯ

- Реабилитация после артроскопии
- Послеоперационная реабилитация (в соответствии с требуемой степенью стабилизации)
- Консервативная терапия смещения бедра
- Артроз бедренного сустава
- Коксалгия или неоперабельные деформации суставов

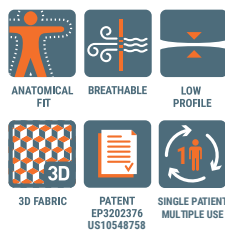

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура из дышащей ткани AirXTM
- Спиральные планки для боковой и передне-боковой поддержки
- Передние застежки на Velcro®
- Зоны на липучке Velcro® для крепления тяг, с цветными индикаторами
- Эластичные калиброванные тяги, с боковым скрещением для:
 - предупреждения чрезмерной аддукции
 - частичного ограничения сгибания-растягивания
- Гелиевая вставка, антиэдема
- Жесткая планка для блокировки сустава в нейтральном положении сгибания и отвода в первые дни после вывиха.
- REF.91007 – Жесткий стержень для:
 - ограничения растягивания (0°-120° каждые 10°)
 - ограничения сгибания (0°-120° каждые 10°)
 - регулировать аддукцию

Орtez -абдуктор шарнир для Hipocross

АПТ.	M91007 R/L
Размер	Универсальный
Цвет	Черный

Левый/правый

АПТ.	M91006 R/L Hipocross			
	S	M	L	XL
Размер				
Обхват таза (см)	72/93	93/116	116/140	140/165
Обхват талии (см)	65/84	84/109	109/140	140/170
Проксимальный обхват бедра (см)	40/54	50/65	60/76	70/87
Цвет	черный			

M91007 R/L Орtez -абдуктор шарнир для Hipocross
Левый/правый



hipo

APT. MSERIE 2000 R/L

Ортез на тазобедренный сустав „HIPO“

ПОКАЗАНИЯ

- До и/или после хирургического вмешательства (артропластика или лечение бедра)
- Не оперируемые или недостаточно консолидированные переломы шейки бедра
- Контроль абдукции и сгибания/разгибания у пациентов с потенциальными проблемами суставов

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Анатомические и прекрасно адаптируемые пластиковые компоненты
- Модульная система, которая позволяет производить замену и адаптацию отдельных компонентов изделия.



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE MODULAR CUSTOMIZABLE FIT

APT.	MSERIE 2000 R/L
Размер	S M L XL
Правая модель	M2112 M2113 M2114 M2115
Левая модель	M2122 M2123 M2124 M2125
Обхват талии (см)	60/82 80/96 94/115 99/120
Обхват гребня подвздошной кости (см)	68/90 90/110 106/126 111/131
Правая модель	M2212 M2213 M2214 M2215
Левая модель	M2222 M2223 M2224 M2225
Проксимальный обхват	44/53 48/60 57/68 62/76
Дистальный обхват	34/41 36/45 42/49 46/56
Цвет	белый

ТАЗОВАЯ ЧАСТЬ				
M2112	M2113	M2114	M2115	
M2122	M2123	M2124	M2125	
60/82	80/96	94/115	99/120	
68/90	90/110	106/126	111/131	
БЕДРЕННАЯ ЧАСТЬ				
M2212	M2213	M2214	M2215	
M2222	M2223	M2224	M2225	
44/53	48/60	57/68	62/76	
34/41	36/45	42/49	46/56	
				белый



Шарниры



Kafo

Kafo, Ортез для удлинения HIPO с захватом стопы
Шарниры Kinesio e Kinesio Offset
Двойное шарнирное соединение



kafo

APT. M2320 R/L - M2321 R/L

Ортез „KAFO“ Устройство для удлинения ортеза HIPO с захватом стопы

ПОКАЗАНИЯ

- Kafo - это дополнительное устройство, которое обеспечивает ортезу бедра контроль за минимальными поворотными движениями, необходимыми для сохранения естественного положения сустава.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Способствует комфорту пациента: более легкий материал, более удобный тунор;
- Односторонняя конструкция уменьшает осложнения, являющиеся следствиями лежащего положения, особенно, у пожилых пациентов;
- Удерживает естественное положение конечности во время сгибания бедра;
- Уменьшает риск вывихов;
- Гарантирует оптимальный контроль при сгибании и разгибании, отведении и поворотах бедра внутрь и наружу



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

APT.	M2320 R/L	M2321 R/L
Размер	Стандартный	Длинный
Длина нижней конечности (пах-пятка) (см)	63/75	76/93
Цвет	белый	

Левый/правый

Размер ноги	S 36/39	M 40/43	L 44/46	XL >46
--------------------	---------	---------	---------	--------



шарниры для HIPO

АПТ. M2303
АПТ. M2304



Kinesio Standard M2303



Kinesio Long M2304

kinesio

Ортез - „Kinesio“ - Шарнир для „HIPO“

- Шарниры Kinesio Offset имеют специальный изгиб, чтобы между шарниром и тазобедренным суставом было больше пространства.
- Возможность регулировки отведения/аддукции с интервалом в 7,5 градусов.
- Возможность регулировки флексии-экстензии от 0 до 120 градусов с интервалом в 15 градусов.

Kinesio стандартный, рост до 1.80 м

Kinesio длинный, рост от 1.80 м

Артикул

M2303

M2304



ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care - feel better

Capire il problema
e trovare la soluzione.
Così nascono
le migliori soluzioni.

КОЛЕНО



genuSKILL 60

Ортез на коленный сустав

АПТ. M33160

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Дисторсии коллатеральных связок I-II степени
- Тендиниты.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
 - дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- CompresSkill
 - эластичная компрессионная мультифибра на задней части ортеза
 - Сверхтонкий профиль, способствующий безболезненному сгибанию колена
 - Удобное и оптимальное прилегание к коленному суставу
- Без отверстия для коленной чашечки
- Укороченная длина.



АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра

коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

M33160

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
27	27	27	27	27	27

серый

Двусторонний



genuFIT 60

Ортез на коленный сустав, короткий, из ткани AirX™


АПТ. MG1160

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Дисторсии коллатеральных связок I-II степени
- Тендиниты

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Мягкие и эластичные края.

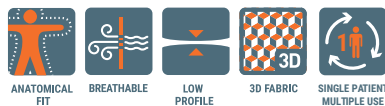

АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от

центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

MG1160

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
27	27	27	27	27	27

черный

Двусторонний



genuSKILL 63

АПТ. M33163


Ортез на коленный сустав короткий, трубчатый, с отверстием для коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Надколенно-бедренная хондропатия хондромалиция
- Предупреждение вывихов надколенной чашечки во время занятий спортом

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
- дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- CompresSkill
- эластичная компрессионная мультифибра
- Сверхтонкий профиль, способствующий безболезненному сгибанию колена
- Оптимальная адаптация к суставу
- Удобное прилегание к конечности
- Укороченная длина
- Отверстие для коленной чашечки

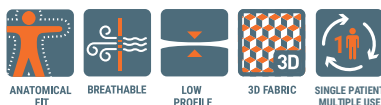

АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

M33163

XS

S

M

L

XL

XXL

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

27

27

27

27

27

27

серый

Двусторонний



genuFIT 63

АПТ. MG1163


Ортез на коленный сустав короткий, трубчатый, с отверстием для коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Надколенно-бедренная хондропатия / хондромалиция
- Предупреждение вывихов надколенной чашечки во время занятий спортом

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Усиленное отверстие для надколенной чашечки

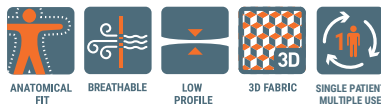

АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

MG1163

XS

S

M

L

XL

XXL

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

27

27

27

27

27

27

черный

Двусторонний



genulastik 04

APT. M90104


Ортез на коленный сустав эластичный

ПОКАЗАНИЯ

- Боль в коленном суставе вследствие ушиба
- Начальные артритные состояния
- Хондропатия / пателлофemorальный синдром
- Легкая нестабильность надколенника
- Профилактика вывиха надколенника при занятиях спортом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Специальная силиконовая вставка поддерживает коленную чашечку при нестабильности сустава.
- Два симметричных тонких стабилизатора обеспечивают правильную локацию коленной чашечки.
- Микросиликоновая трубка для большей мягкости и прочности при натяжении.

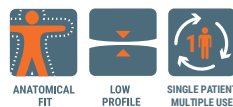

APT.

Размер

Обхват бедра в 14 см от центра коленной чашечки (см)

Обхват голени в 12 см ниже центра коленной чашечки

Цвет

M90104

0	1	2	3	4	5	6	7
35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49

синий

Двусторонний



genuSKILL 04

APT. M33104


Ортез на коленный сустав трубчатый, со стабилизатором коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Надколенно-бедренная хондропатия хондромалация
- Легкая нестабильность надколенника
- Предупреждение вывихов надколенной чашечки во время занятий спортом

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill - дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- CompresSkill - эластичная компрессионная мультифибра на задней поверхности ортеза
- Сверхтонкий профиль, способствующий безболезненному сгибанию колена
- Оптимальная адаптация к суставу
- Удобное прилегание к конечности
- FlexSkill - ткань из эластомерного волокна на передней части ортеза
- Стабилизатор коленной чашечки
- Боковые и медиальные ребра жесткости во избежание смещения ортеза при использовании

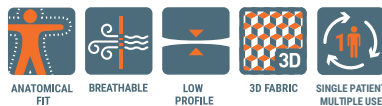

APT.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

M33104

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

серый

Двусторонний




genuFIT 04

Ортез на коленный сустав трубчатый, со стабилизатором коленной чашечки, из ткани AirX™

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Надколенно-бедренная хондропатия / хондромалация
- Легкая нестабильность надколенника
- Предупреждение вывихов надколенной чашечки во время занятий спортом

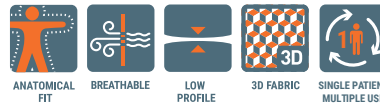

APT.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

MG1104

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

черный

Двусторонний

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Отверстие для коленной чашечки со стабилизатором из вспененного полимера;
- Тонкие боковые шины, препятствующие смещению



genuSKILL 08

APT. M33108

Ортез на коленный сустав трубчатый, со спиральными ребрами и стабилизатором коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз на начальной стадии или остаточные явления дисторсий с легкой остаточной слабостью связок коллатеральных связок (неоперабельное колено);
- Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
- Артроз тазобедренного/коленного сустава.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
 - дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- FlexSkill
 - ткань из эластомерного волокна



APT. Размер Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см) Длина (см) Цвет	M33108					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
	серый					

Двусторонний

- Стабилизатор коленной чашечки
- Задняя часть из ткани CompresSkill: эластичная компрессионная мультифибра
 - Очень низкий профиль для предотвращения натирания (при сгибании колена)
 - Оптимальная адаптация к суставу
 - Удобное прилегание к конечности
- Стабилизирующие верхний и нижний ремни с симметричной системой застегивания предотвращающие смещение
 - Стабилизирующие латеральные и медиальные полицентрические шарниры
 - Резиновый язычок-фиксатор для удобного расстегивания липучки



genuFIT 08

APT. MG1108

Ортез на коленный сустав трубчатый, со спиральными ребрами и стабилизатором коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз на начальной стадии или остаточные явления дисторсий с легкой остаточной слабостью связок коллатеральных связок (не оперируемое колено);
- Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
- Артроз тазобедренного/коленного сустава.



APT. Размер Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см) Длина (см) Цвет	MG1108					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
	черный					

Двусторонний

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхплоский дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Отверстие для коленной чашечки со стабилизатором из вспененного полимера;
- Обновленная система застегивания: ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки давления.
- Новые низкопрофильные карманы из гибкого полимера для вставки шин и проведения ремней.
- Боковые усиливающие спиральные шины.



genuSKILL 08A

АПТ. M33108A


Ортез на коленный сустав разъемный, со спиральными ребрами

ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз на начальной стадии или остаточные явления дисторсий с легкой остаточной слабостью связок коллатеральных связок (неоперабельное колено);

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
- дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.

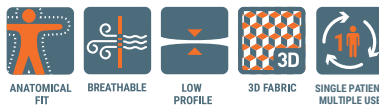

- Задняя часть из ткани CompresSkill:
- эластичная компрессионная мультифибра
- Очень низкий профиль для предотвращения натирания (при сгибании колена)
- Оптимальная адаптация к суставу
- Удобное прилегание к конечности
- Стабилизирующие латеральные и медиальные полицентрические шарниры
- Стабилизирующие верхний и нижний ремни с симметричной системой застегивания предотвращающие смещение
- Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.
- Резиновый язычок-фиксатор для удобного растягивания липучки

АПТ.	M33108A					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Длина (см)	34	34	34	34	34	34
Цвет	серый					

Двусторонний



genuFIT 08A

АПТ. MG1108A


Ортез на коленный сустав разъемный, со спиральными ребрами

ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз на начальной стадии или остаточные явления дисторсий с легкой остаточной слабостью связок коллатеральных связок (не оперируемое колено);

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;

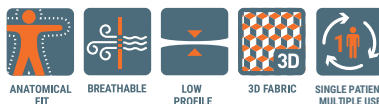

- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Новая система двойного расстегивания спереди для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка предварительной фиксации и внешняя застежка - окончательной фиксации. Отверстие для коленной чашечки
- Обновленная застегивающая система: ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки давления.
- Новые низкопрофильные карманы из гибкого полимера для вставки шин и проведения ремней.
- Боковые усиливающие спиральные шины.

АПТ.	MG1108A					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Длина (см)	34	34	34	34	34	34
Цвет	черный					

Двусторонний

АРТ. M33115

genuSKILL 15

Ортез на коленный сустав, с регулируемым шарниром, с контролем флексии-экстензии и стабилизатором коленной чашечки



ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз или остаточные явления дисторсий с остаточной неустойчивостью коллатеральных связок (неоперабельное колено);
- Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
- Артроз тазобедренного/коленного сустава.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- BreathSkill
- дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- Передняя часть из ткани FlexSkill ткань из эластомерного волокна
- Стабилизатор коленной чашечки
- Задняя часть из ткани CompresSkill: эластичная компрессионная мультифибра
- Оптимальная адаптация к суставу
- Удобное прилегание к конечности
- Стабилизирующие латеральные и медиальные полицентрические шарниры (с возможностью ограничения сгибания до 60° или 90°).
- Стабилизирующие верхний и нижний ремни с симметричной системой застегивания предотвращающие смещение
- Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.
- Резиновый язычок-фиксатор для удобного расстегивания липучки



АРТ.	M33115
Размер	XS S M L XL XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Длина (см)	34 34 34 34 34 34
Цвет	серый

АРТ.	M33115
Размер	XS S M L XL XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Длина (см)	34 34 34 34 34 34
Цвет	серый

Двусторонний

АРТ. MG1115

genuFIT 15

Ортез на коленный сустав из материала AirX™ с регулируемым шарниром, с контролем флексии-экстензии и стабилизатором коленной чашечки



ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз или остаточные явления дисторсий с остаточной неустойчивостью коллатеральных связок (не оперируемое колено);
- Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
- Артроз тазобедренного/коленного сустава.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Отверстие для коленной чашечки со стабилизатором из вспененного полимера;
- Обновленная застегивающая система: ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки давления;
- Низкопрофильные полицентрические шарнирно соединенные стержни.



АРТ.	MG1115
Размер	XS S M L XL XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Длина (см)	34 34 34 34 34 34
Цвет	черный

АРТ.	MG1115
Размер	XS S M L XL XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Длина (см)	34 34 34 34 34 34
Цвет	черный

Двусторонний



genuSKILL 15A

APT. M33115A

Ортез на коленный сустав разъемный, с шарнирами и стабилизатором коленной чашечки


ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз или остаточные явления дисторсий с остаточной неустойчивостью коллатеральных связок (неоперабельное колено);

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из ткани BreathSkill:
 - дышащая ткань
 - объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.

- Задняя часть из ткани CompresSkill:
 - эластичная компрессионная мультифибра
 - Очень низкий профиль для предотвращения натирания (при сгибании колена)
 - Оптимальная адаптация к суставу
 - Удобное прилегание к конечности
- Стабилизирующие латеральные и медиальные полицентрические шарниры (с возможностью ограничения сгибания до 60° или 90°).
- Стабилизирующие верхний и нижний ремни с симметричной системой застегивания предотвращающие смещение
 - Резиновый язычок-фиксатор для удобного расстегивания липучки

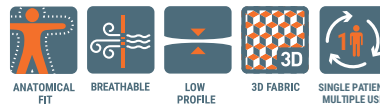

АПТ.	M33115A
Размер	
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39
Длина (см)	34
Цвет	серый

	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Длина (см)	34	34	34	34	34	34

Двусторонний



genuFIT 15A

APT. MG1115A

Ортез на коленный сустав разъемный, с шарнирами


ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз или остаточные явления дисторсий с остаточной неустойчивостью коллатеральных связок (не оперируемое колено);

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый анатомический сверхтонкий дизайн обеспечивает хорошую гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу;
- Конструкция из дышащей ткани AirX™;

- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта;
- Новый более мягкий и эластичный край;
- Новая система двойного расстегивания спереди для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка предварительной фиксации и внешняя застежка - окончательной фиксации. Отверстие для коленной чашечки
- Обновленная система застегивания: ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки давления.
- Новые низкопрофильные карманы из гибкого полимера для вставки шин и проведения ремней.
- Низкопрофильные полицентрические шарнирно соединенные стержни.

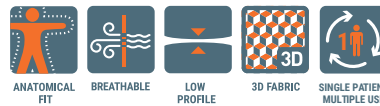

АПТ.	MG1115A
Размер	
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39
Длина (см)	34
Цвет	черный

	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Длина (см)	34	34	34	34	34	34

Двусторонний



genuSKILL 16

АПТ. M33116 R/L

Ортез на коленный сустав со стабилизатором коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Латерально-медиальная неустойчивость надколенной чашечки
- Артроз тазобедренного/коленного сустава
- Гонартроз

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Задняя часть из ткани CompresSkill: - Упругая компрессионная



- многоволоконная пряжа
- Сверхтонкий профиль, способствующий безболезненному сгибанию колена
- Оптимальная адаптация к суставу
- Удобное прилегание к конечности
- Боковые и медиальные ребра жесткости во избежание смещения ортеза при использовании
- Система выравнивания надколенной чашечки
 - J-образный боковой стабилизатор из вспененного материала
 - Накладка для усиления и поддержки коленной чашечки с регулируемыми по размеру лентами для затягивания

АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

M33116 R • M33116 L

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

серый

Левый/правый

ПРАВЫЙ: латеро-медиальный толчок на правое колено/левое колено

ЛЕВЫЙ: латеро-медиальный толчок на левое колено/правое колено



genuFIT 16

АПТ. MG1116 R/L


Ортез на коленный сустав со стабилизатором коленной чашечки

ПОКАЗАНИЯ

- Латерально-медиальная неустойчивость надколенной чашечки
- Артроз тазобедренного/коленного сустава
- Гонартроз

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из дышащей ткани AirX™;
- Отверстие для коленной чашечки с боковым J-образным стабилизатором из вспененного материала
- Спиралевидные боковые и медиальные шины
- Стяжки с воротом (для индивидуальной посадки)
- Подколенная вставка из ткани Soft-X для большего комфорта

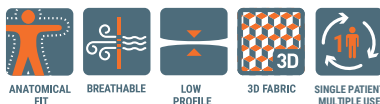

АПТ.

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

MG1116 R • MG1116 L

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

черный

Левый/правый

ПРАВЫЙ: латеро-медиальный толчок на правое колено/левое колено

ЛЕВЫЙ: латеро-медиальный толчок на левое колено/правое колено



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см
от центра коленной
чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний


genuSKILL 22/22A

АРТ. M33122 / M33122A

Ортезы на коленный сустав с регулируемым полицентрическими шарнирами F-E

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени тяжести медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятии спортом;
- Хроническая латеро-медиальная нестабильность;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (неоперабельное колено).

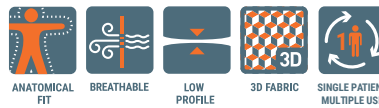

M33122 (трубчатый) · M33122A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

серый

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция наколенника выполнена из ткани BreathSkill:
 - объемная текстура;
 - дышащая ткань
 - объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Задняя часть выполнена из CompresSkill:
 - Эластичная компрессионная мультифибра
 - Превосходное прилегание к конечности.
- **только для GenuSkill22:** Передняя часть выполнена из FlexSkill: ткань из эластомерного
- волокна. В комплекте со стабилизатором надколенной чашечки.
- **только для GenuSkill22A:** Передняя застежка на липучках; обновленная конструкция для большей легкости застегивания.
- Полицентрические шарниры, легко регулируемые с помощью штифтов. Сгибание, разгибание или блокировка: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- Последующие застегивания и расстегивания выполняются с помощью быстро сцепляемой/расцепляемой пряжки, и фиксирующей застежки на липучках
- Новая система застегивания ремней:
 - Первая регулировка может быть произведена с помощью Y-образных застежек на липучках



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см
от центра коленной
чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний

genuFIT 29/29A

АРТ. MG1129 / MG1129A

Ортезы на коленный сустав с регулируемым полицентрическими шарнирами F-E

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение вывихов I и II степени медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов вывихов медиальной и латеральной коллатеральной связки при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная/медиальная нестабильность надколенника;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (не оперируемое колено)



MG1129 (трубчатый) · MG1129A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

черный

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый ультратонкий анатомический дизайн обеспечивает хорошую гибкость движения с оптимальной адаптацией к суставу
- Конструкция из дышащей ткани AirX™, с лентами, застегивающимися на липучках Velcro®
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта
- Новый, более мягкий и эластичный бортик
- **Только для GenuFIT 29:** отверстие для надколенной чашечки со стабилизатором из пенопласта
- **Только для GenuFIT 29A:** новое переднее отверстие, раздвоенное для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка для предварительной фиксации и наружная застежка для окончательной фиксации.
- Отверстие для надколенной чашечки полицентрический шарнир, легко регулируемый снаружи с помощью стержней: разгибание, сгибание или блокировка: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см
от центра коленной
чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний


genuSKILL 24A

АРТ. M33124A

Ортез на коленный сустав с полицентрическими шарнирами и контролем F-E длинный, разъемный

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени тяжести медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятии спортом;
- Хроническая латеро-медиальная нестабильность;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (неоперабельное колено).

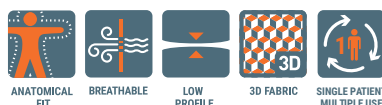

M33124A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

серый

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция наколенника выполнена из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой
- Задняя часть выполнена из CompresSkill: эластичная компрессионная мультифибра;
 - Максимальная адаптируемость;
 - Превосходное прилегание к конечности.
- Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.
- Полицентрические шарниры, легко регулируемые с помощью штифтов. Сгибание, разгибание или блокировка: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- Последующие застегивания и расстегивания выполняются с помощью быстро сцепляемой/расцепляемой пряжки, ворота и фиксирующей застежки на липучках
- Новая система застегивания ремней:
 - Первая регулировка может быть произведена с помощью Y-образных застежек на липучках



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см
от центра коленной
чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний


genuFIT 30/30A

АРТ. MG1130 / MG1130A

Ортезы на коленный сустав с полицентрическими шарнирами и контролем F-E

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение вывихов I-й и II-й степени медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов вывихов медиальной и латеральной коллатеральной связки при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная/медиальная нестабильность надколенника;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (не оперируемое колено)

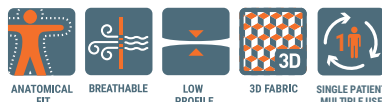


MG1130 (трубчатый) · MG1130A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

черный

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый ультратонкий анатомический дизайн обеспечивает хорошую гибкость движения с оптимальной адаптацией к суставу
- Конструкция из дышащей ткани AirX™, с лентами, застегивающимися на липучках Velcro®
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта
- Новый, более мягкий и эластичный край
- **Только для genuFIT30:** отверстие для надколенной чашечки со стабилизатором из пенопласта
- **Только для genuFIT 30A:** новое переднее отверстие, раздвоенное для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка для предварительной фиксации и наружная застежка для окончательной фиксации.
- Отверстие для надколенной чашечки полицентрический шарнир, легко регулируемый снаружи с помощью стержней: разгибание, сгибание или блокировка: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

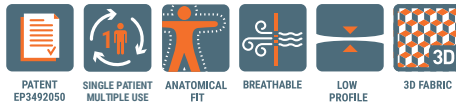

Арт. EP3492050

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

Двусторонний

genuSKILL 26/26A

Арт. M33126 / M33126A
ПАТЕНТ EP3492050

Ортезы на коленный сустав с полицентрическими шарнирами и контролем F-E, короткий

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени тяжести медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятии спортом;
- Хроническая латеро-медиальная нестабильность;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (неоперабельное колено).

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция наколенника выполнена из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Задняя часть выполнена из CompresSkill: эластичная компрессионная мультифибра; - Превосходное прилегание к конечности.
- **только для GenuSkill26:** Передняя часть выполнена из FlexSkill: ткань из эластомерного волокна. В комплекте со стабилизатором надколенной чашечки.
- **только для GenuSkill26A:** Новая система застегивания ремней с помощью быстро сцепляемой пряжки и фиксирующей застежки на липучках Velcro®.
- Последующие застегивания и расстегивания выполняются с помощью быстро сцепляемой/расцепляемой пряжки, ворота и фиксирующей застежки на липучках
- Новое полицентрическое шарнирное соединение
- CLICCKLACK, легко регулируемое при помощи клиньев и БЕЗ каких-либо дополнительных инструментов:
 - Разгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°;
 - Сгибание: 45°, 60°, 75°, 90°;
 - Блокировка: 0°, 10°, 20°, 30°.
- Новая система застегивания ремней:
 - Первая регулировка может быть произведена с помощью Y-образных застежек на липучках

M33126 (трубчатый) / M33126A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

серый



Арт. EP3492050

Размер

Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)

Длина (см)

Цвет

Двусторонний

genuFIT 25/25A

Арт. MG1125 / MG1125A
ПАТЕНТ EP3492050

Ортез на коленный сустав с полицентрическими шарнирами и контролем F-E, короткий

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение вывихов I-й и II-й степени медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов вывихов медиальной и латеральной коллатеральной связки при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная/медиальная нестабильность надколенника;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (не оперируемое колено)

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый ультратонкий анатомический дизайн обеспечивает хорошую гибкость движения с оптимальной адаптацией к суставу
- Конструкция из дышащей ткани AirX™, с оттяжками, застегивающимися на липучках Velcro®
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта
- Новый, более мягкий и эластичный край
- **только для GenuFIT 25** отверстие для надколенной чашечки со стабилизатором из пенопласта
- **только для GenuFIT 25A:** новое переднее отверстие, раздвоенное для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка для предварительной фиксации и наружная застежка для окончательной фиксации.
- Отверстие для надколенной чашечки
- Новое полицентрическое шарнирное соединение CLICCKLACK, легко регулируемое при помощи клиньев и БЕЗ каких-либо дополнительных инструментов:
 - Разгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°;
 - Сгибание: 45°, 60°, 75°, 90°;
 - Блокировка: 0°, 10°, 20°, 30°.

MG1125 (трубчатый) · MG1125A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

черный



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

М33128А (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

серый

Двусторонний

genuSKILL 28A

АРТ. М33128А
ПАТЕНТ EP3492050

Ортез на коленный сустав с полицентрическим шарниром и контролем F-E, длинный, разъемный

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени тяжести медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятии спортом;
- Хроническая латеро-медиальная нестабильность;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (неоперабельное колено).

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция наколенника выполнена из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Задняя часть выполнена из CompresSkill:
 - Эластичная компрессионная мультифибра;
 - Превосходное прилегание к конечности.
- Передняя застежка на липучках; обновленная конструкция для большей легкости застегивания.
- Последующие застегивания и расстегивания выполняются с помощью быстро сцепляемой/расцепляемой пряжки, ворота и фиксирующей застежки на липучках
- Новое низкопрофильное полицентрическое шарнирное соединение CLICKCLACK, легко регулируемое при помощи клиньев и БЕЗ каких-либо дополнительных инструментов:
 - Разгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°;
 - Сгибание: 45°, 60°, 75°, 90°;
 - Блокировка: 0°, 10°, 20°, 30°.
- Новая система застегивания ремней:
 - Первая регулировка может быть произведена с помощью Y-образных застежек на липучках;



АРТ.
Размер
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

MG1127 (трубчатый) · MG1127A (разъемный)

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

черный

Двусторонний

genuFIT 27/27A

АРТ. MG1127 / MG1127A
ПАТЕНТ EP3492050

Ортезы на коленный сустав с полицентрическими шарнирами и контролем F-E, длинные

ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение вывихов I-й и II-й степени медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов вывихов медиальной и латеральной коллатеральной связки при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная/медиальная нестабильность надколенника;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артрозная нестабильность (не оперируемое колено)

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Новый ультратонкий анатомический дизайн обеспечивает хорошую гибкость движения с оптимальной адаптацией к суставу
- Конструкция из дышащей ткани AirX™, с оттяжками, застегивающимися на липучках Velcro®
- Новая подколенная вставка (без центрального шва) из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта
- Новый, более мягкий и эластичный бортик
- **Только для genuFIT 27:** отверстие для надколенной чашечки со стабилизатором из пенопласта
- **Только для genuFIT 27A:** новое переднее отверстие, раздвоенное для облегчения надевания: центральная внутренняя застежка для предварительной фиксации и наружная застежка для окончательной фиксации.
- Отверстие для надколенной чашечки
- Новое полицентрическое шарнирное соединение CLICKCLACK, легко регулируемое при помощи клиньев и БЕЗ каких-либо дополнительных инструментов:
 - Разгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°;
 - Сгибание: 45°, 60°, 75°, 90°;
 - Блокировка: 0°, 10°, 20°, 30°.
- задняя эластичная вставка в проксимальной части бедра



immok 0°

Арт. M8104 -M8105 -M8106 -M8107

Ортез-тutor иммобилизирующий для коленного сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Экстренная иммобилизация коленного сустава. Рекомендован вместо гипса при повреждениях менисков, переломах надколенника.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- Конструкция из мягкого пенополиуретана с двойной подкладкой
- Внутреннее губчатое покрытие
- Моделируемые жесткие срединные, боковые и задние стержни из легкого сплава
- Открытая коленная чашечка
- Моющийся



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Арт.	M8104	M8105	M8106	M8107
Иммобилизация	0°	0°	0°	0°
Длина (см)	40	50	60	70
Цвет	черный			

Двусторонний

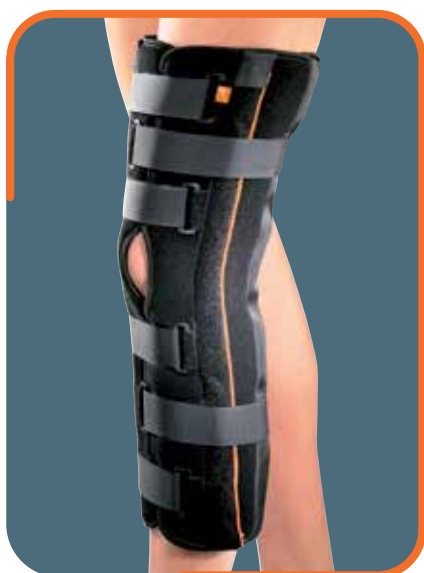

immok 20°

Арт. M8104/F-M8105/F
M8106/F-M8107/F

Ортез-тutor иммобилизирующий для коленного сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Иммобилизация коленного сустава под углом 20° (после хирургического вмешательства или после травмы)

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из мягкого пенополиуретана с двойной подкладкой
- Внутреннее губчатое покрытие
- Моделируемые жесткие срединные, боковые и задние стержни из легкого сплава расположенные с изгибом в 20°
- Открытая коленная чашечка
- Моющийся



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Арт.	M8104/F	M8105/F	M8106/F	M8107/F
Иммобилизация	20°	20°	20°	20°
Длина (см)	40	50	60	70
Цвет	черный			

Двусторонний



АРТ.
Размер
Длина конечности от паха до голеностопа (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний



MG1043	
Стандартный	Длинный
< 81	> 81
56	65
черный	

go up open

Ортез на коленный сустав (жесткий)
открытый, послеоперационный

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационное лечение, которое требует контроля сгибания-разгибания колена (восстановление связок, транспозиция апофиза передней поверхности большеберцовой кости, переломы дистальной трети бедренной кости, переломы проксимальной трети большеберцовой кости, переломы коленной чашечки, повреждения сухожилий разгибающих мышц);
- Посттравматическая стадия вывихов колена;
- Остеотомия, вывернутая вовнутрь или наружу.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Лонгеты для прохождения ремней с конструктивной системой самозащелпывания;
- Легкий не металлический регулировочный шарнир с интуитивной регулировкой;
- Сгибание: от 0° до +120° с шагом 10°;
- Разгибание: от -10° до +60° с шагом 10°;
- Возможность блокировки сустава от 0° до +60° с шагом 10°;
- Относящиеся к мышцелку защитные вкладыши, можно снять и произвести их очистку;
- Конструкция с соединёнными с помощью шарниров стержнями из легкого алюминиевого сплава;
- Возможность укоротить тугор, пользуясь направляющими знаками, нанесенными на стержни;
- Подкладки из пенополиуретана (МТР) для ограничения перемещения тугора и для защиты ноги от прямого контакта со стержнями; поскольку они имеют подкладку только снаружи, их можно отрезать для лучшей адаптации к окружности ноги

АРТ. MG1043



АРТ.
Размер
Длина конечности от паха до голеностопа (см)
Длина (см)
Цвет

Двусторонний



MG1042		MG1041
Стандартный	Длинный	Rehab
< 81	> 81	
56	65	40
черный		

go up

Ортез на коленный сустав (жесткий) послеоперационный

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационное лечение, которое требует контроля сгибания-разгибания колена (восстановление связок, транспозиция апофиза передней поверхности большеберцовой кости, переломы дистальной трети бедренной кости, переломы проксимальной трети большеберцовой кости, переломы коленной чашечки, повреждения сухожилий разгибающих мышц);
- Посттравматическая стадия вывихов колена;
- Остеотомия, вывернутая вовнутрь или наружу;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Лонгеты для прохождения ремней с конструктивной системой самозащелпывания;
- Легкий не металлический регулировочный шарнир с интуитивной регулировкой;
- Сгибание: от 0° до +120° с шагом 10°;
- Разгибание: от -10° до +60° с шагом 10°;
- Возможность блокировки сустава от 0° до +60° с шагом 10°;
- Относящиеся к мышцелку защитные вкладыши, можно снять и произвести их очистку;
- Конструкция с соединёнными с помощью шарниров стержнями из легкого алюминиевого сплава;
- Возможность укоротить тугор, пользуясь направляющими знаками, нанесенными на стержни;
- Подкладки из пенополиуретана (МТР) для ограничения перемещения тугора и для защиты ноги от прямого контакта со стержнями; поскольку они имеют подкладку только снаружи, их можно отрезать для лучшей адаптации к окружности ноги.

АРТ. MG1042 / MG1041




go up T

Ортез на коленный сустав (жесткий)
послеоперационный, телескопический

APT. MG1046

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационное лечение, которое требует контроля сгибания-разгибания колена (восстановление связок, транспозиция апофиза передней поверхности большеберцовой кости, переломы дистальной трети бедренной кости, переломы проксимальной трети большеберцовой кости, переломы коленной чашечки, повреждения сухожилий разгибающих мышц)
- Посттравматическая стадия вывихов колена
- Остеотомия, вывернутая вовнутрь или наружу

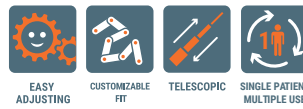

АПТ.

Размер

Длина шарнира (см)

Цвет

MG1046

универсальный

50/65

черный

Двусторонний

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Телескопический боковой шарнирный стержень из легкого алюминиевого сплава;
- Телескопическая регулировка длины с помощью простых кнопок, имеющих на лонгетах;
- Лонгеты для прохождения ремней с конструктивной системой самозащелкивания • Легкий не металлический регулировочный шарнир с интуитивной регулировкой;
 - Сгибание: от 0° до +120° с шагом 10°;
 - Разгибание: от -10° до +60° с шагом 10°;
 - Возможность блокировки сустава от 0° до +60° с шагом 10°;
- Относящиеся к мышечку защитные вкладыши, можно снять и произвести их очистку
- Подкладки из пенополиуретана (МТР) для ограничения перемещения тьютора и для защиты ноги от прямого контакта со стержнями; поскольку они имеют подкладку только снаружи, их можно отрезать для лучшей адаптации к окружности ноги



go up pcl

Ортез на коленный сустав (жесткий) послеоперационный

APT. MG1044

ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационная терапия, в процессе которой необходима защита при сгибании-разгибании колена (восстановление задней крестообразной связки)
- Реабилитационный период после вывиха колена



АПТ.

Размер

Длина шарнира (см)

Цвет

MG1044

универсальный

56

черный

Двусторонний

ПОКАЗАНИЯ

- Надуваемый подшпикник в задней части мениска для селективного снятия нагрузки задней крестообразной связки
- Регулировочный неметаллический шарнир, легкий и интуитивный в использовании
 - Сгибание: от 0° до +120° с шагом 10°
 - Разгибание: от -10° до +60° с шагом 10°
 - Возможность блокировки сустава от 0° до +60° с шагом 10°
 - Структурная система крепления (липучка не приклеена)
- Структура с шарнирными стержнями из легкого алюминиевого сплава
- Наполнитель из МТР для ограничения смещения тьютора и обеспечения защиты ноги от непосредственного контакта со стержнями. Обшитый только снаружи, он может обрезаться, в целях обеспечения превосходной адаптации окружности ноги
- Отдельные передние и задние ремешки, для гарантии точного позиционирования стержней вдоль срединной линии ноги
- Защитные съемные и моющиеся подшпикники

Подушечка с поддувом
для выборочной разгрузки
большеберцовой кости



Арт. М33040 R/L
Размер
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Левый/правый


pluspoint 4

Арт. М33040 R/L
ПАТЕНТ EP3492050

Ортез на коленный сустав (полужесткий) с 4-х точечной фиксацией

ПОКАЗАНИЯ

- Нестабильность и переломы L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. или в сочетании
- Травматическая или дегенеративная нестабильность коленного сустава
- Лечение до и после операции, реабилитационное или консервативное лечение травм
- Защита связок во время спортивных мероприятий

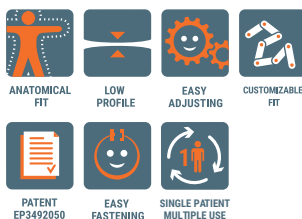

М33040 R/L

S	M	L	XL	XXL
39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
40	40	40	40	40

черный

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Инновационный анатомический дизайн, который оптимально прилегает к конечности
- Инновационный лёгкий и прочный каркас из специального алюминиевого формуемого сплава (моделирование облегчает фиксацию бедра и голени); окрашен в матовый чёрный
- Новые пряжки из специального гибкого полимера, съёмные оснащены системой защиты от вращения; облегчают применение и приспосабливаются по ноге
- Новые ремни Velcro® усиленные, продублированные для лучшей адаптации, а также по отдельности съёмные
- Обшивка ремней МТР покрыта мягким вельветом, без швов и клеевых соединений для удобного ношения в непосредственном контакте с кожей
- Многоцентровой подшипник низкого профиля, легко регулируется с помощью клиньев разгибания: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; сгибания: 45°, 60°, 75°, 90°; блокировки: 0°, 10°, 20°, 30°
- Анатомическая медиальная мышечковая прокладка, смонтированная для максимального комфорта и оптимальной устойчивости
- Два дополнительных комплекта мышечковых прокладок различной толщины, легко заменяемых для лёгкой адаптации колена (например, после регрессии отёка при нагрузке сустава)
- Внутренняя обшивка каркаса (съёмная для чистки) фиксируется автоматически. Материал покрытия не вызывает аллергии, со свойствами анти-скольжения из ткани MultiGrip



Арт. М9540 R/L
Размер
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)
Длина (см)
Цвет

Левый/правый

pluspoint 3

Арт. М9540 R/L

Ортез на коленный сустав (полужесткий)

ПОКАЗАНИЯ

- Нестабильность и переломы L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. или в сочетании
- Травматическая или дегенеративная нестабильность коленного сустава
- Лечение до и после операции, реабилитационное или консервативное лечение травм
- Защита связок во время спортивных мероприятий



М9540 R/L

XS	S	M	L	XL	XXL
34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
40	40	40	40	40	40

черный

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Инновационный анатомический дизайн, который оптимально прилегает к конечности;
- Инновационный лёгкий и прочный каркас из специального алюминиевого формуемого сплава окрашен в матовый чёрный;
- Новые пряжки из специального гибкого полимера, съёмные по отдельности, оснащены системой защиты от вращения;
- Новые ремни Velcro® усиленные, продублированные для лучшей адаптации, а также по отдельности съёмные;
- Обшивка ремней МТР покрыта мягким вельветом, без швов и клеевых соединений для удобного ношения в непосредственном контакте с кожей
- Многоцентровой подшипник низкого профиля, легко регулируется с помощью клиньев разгибания: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; сгибания: 45°, 60°, 75°, 90°; блокировки: 0°, 10°, 20°, 30°;
- Анатомическая медиальная мышечковая прокладка, смонтированная для максимального комфорта и оптимальной устойчивости;
- Два дополнительных комплекта мышечковых прокладок различной толщины, легко заменяемых для лёгкой адаптации колена (например, после регрессии отёка при нагрузке сустава);
- Внутренняя обшивка каркаса (съёмная для чистки) фиксируется автоматически с помощью низкого профиля для обеспечения безопасного размещения. Материал покрытия аллергии, со свойствами анти-скольжения из ткани MultiGrip.



pluspoint 3 short

АРТ. M9530 R/L

Ортез на коленный сустав (полужесткий) короткий, функциональный

ПОКАЗАНИЯ

- Нестабильность и переломы L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. или в сочетании
- Травматическая или дегенеративная нестабильность коленного сустава
- Лечение до и после операции, реабилитационное или консервативное лечение травм
- Защита связок во время спортивных мероприятий



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Инновационный анатомический дизайн, который оптимально соответствует конечности;
- Инновационный лёгкий и прочный каркас из специального алюминиевого формуемого сплава, окрашен в матовый чёрный;
- Новые пряжки из специального гибкого полимера, съёмные по отдельности, оснащены системой защиты от вращения;
- Новые ремни Velcro® усиленные, продублированные для лучшей адаптации, а также по отдельности съёмные;
- Обшивка ремней МТР покрыта мягким вельветом, без швов и клеевых соединений для удобного ношения в непосредственном контакте с кожей;
- Многоцентральной подшипник низкого профиля, легко регулируется с помощью клиньев разгибания: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; сгибания: 45°, 60°, 75°, 90°; блокировки: 0°, 10°, 20°, 30°;
- Анатомическая медиальная мышечковая прокладка, смонтированная для максимального комфорта и оптимальной устойчивости;
- Два дополнительных комплекта мышечковых прокладок различной толщины, легко заменяемых для лёгкой адаптации колена (например, после регрессии отёка при нагрузке сустава);
- Внутренняя обшивка каркаса (съёмная для операций очистки) фиксируется автоматически с помощью;
- низкого профиля для обеспечения безопасного размещения. Материал покрытия не вызывает аллергии, со свойствами анти-скольжения из ткани MultiGrip.

АРТ.	M9530 R/L				
Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Длина (см)	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Цвет	чёрный				

Левый/правый



Новинка 2022


pluspoint FAST

АРТ. M22040
ПАТЕНТ EP3492050
ПАТЕНТ US10548758

Ортез на коленный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Нестабильность и переломы L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. или в сочетании
- Комплексная нестабильность коленного сустава вследствие травмы или дегенеративных процессов.
- До или послеоперационная консервативная терапия, реабилитационный период.
- Защита связок при занятиях спортом.

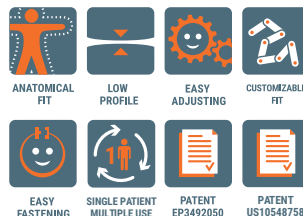

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Каркас:
 - Из легкого и прочного алюминиевого сплава, удобно моделируемого под анатомию бедра и голени
 - Анатомический дизайн для оптимального прилегания к суставу
 - Благодаря передним разъемам не нужно одевать ортез со стопы.
- Полицентричный, незаметный шарнир CLICKCLACK легко отрегулировать без инструментов с помощью клиньев
 - Экстензия: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Флексия: 45°, 60°, 75°, 90°
 - Имобилизация: 0, 10°, 20°, 30°;
- Система застёжек:
 - Застежки с кнопкой безопасности, чтобы одевать ортез без использования застёжек на липучках (регулируется только при первом применении).
 - Раздвоенные ремешки на липучках Velcro® для наилучшей фиксации и удобной подгонки.
 - Подкладки ремней выполнены из мягкой велюровой ткани МТР без швов и склеивания. Подкладка каркаса;
- Внутренняя сторона из гипоаллергенного, нескользящего материала multi grip
- Незаметная автоматическая фиксация подкладки гарантирует надежное крепление (отсоединяется при чистке);
- Для оптимального комфорта предусмотрены боковые утолщения;
- Мышечковая анатомическая подушка для оптимальной стабилизации.



АРТ.	M22040				
Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Длина (см)	40	40	40	40	40
Цвет	темно-серый				

Левый/правый



Новинка 2022

КОА


Ортез на коленный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Односторонний гонартроз средней и тяжелой формы
- Послеоперационный период при операциях на хряще или менисках

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Запатентованная система ремней:
 - эффективное одностороннее «облегчение» нагрузки с помощью трехточечной поддерживающей системы
 - действует, когда это необходимо: в положении сидя давление уменьшается, а в положении стоя система ремней натягивается

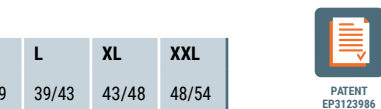

- легкое натяжение с помощью лебедочной системы
- простая регулировка
- Основа из эластичной ткани PlusComfort: внутри изготовлена - из хлопка для максимального комфорта, снаружи - из полиэстера для максимальной прочности
- Легкие лонгеты из технополимера, адаптируемые к ноге, с местами крепления пряжек
- Односторонний стержень из легкого алюминиевого сплава с возможностью ограничения угла разгибания (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) и сгибания (45°, 60°, 75°, 90°)
- Грибовидные пряжки со встроенным приспособлением для облегчения натяжения; магнитный возврат натяжного приспособления для его фиксации после использования
- Мышелковая набивка из техногеля для «рассеяния» давления, оказываемого ремнями системой
- Регулируемые ремни с помощью практических Y-образных застежек на липучке
- Эластичные ремни на бедро и голень для большего комфорта при движении; с набивкой, крепление с помощью застежек на липучке

АРТ. M20014 R/L

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чашечки (см)	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/54
Высота (см)	40	40	40	40	40	40
Цвет	серый					

Левый/правый



- ПРАВЫЙ** = при медиальном гонартрозе правого колена (варус правого колена) или при латеральном гонартрозе левого колена (вальгус левого колена)
- ЛЕВЫЙ** = при медиальном гонартрозе левого колена (варус левого колена) или при латеральном гонартрозе правого колена (вальгус правого колена)



ОРТНО-А

Ортез на коленный сустав (при гонартрозе)

ПОКАЗАНИЯ

- Одномышелковое протезирование при умеренном гонартрозе;
- Послеоперационный курс в отношении хрящей или менисков коленного сустава



АРТ. M91014 R/L


Размер	Универсальный
Цвет	серый


Левый/правый

- ПРАВЫЙ** = при медиальном гонартрозе правого колена (варус правого колена) или при латеральном гонартрозе левого колена (вальгус левого колена)
- ЛЕВЫЙ** = при медиальном гонартрозе левого колена (варус левого колена) или при латеральном гонартрозе правого колена (вальгус правого колена)

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкая конструкция из сплава алюминия и технополимера;
- Односторонний стержень для лучшей носкости и эффективности; с рычажным механизмом для разгрузки медиального или латерального отдела колена;
- Пряжки быстрого застегивания/расстегивания для надевания ортеза без использования текстильной застежки (регулируются только при первом надевании);
- Мягкая съемная и стирающаяся обивка;
- Принадлежности в комплекте:
 - Дополнительная мышелковая опора;
 - Клинья для ограничения угла разгибания 0°, 5°, 10°, 15°, 20° или 25° и сгибания 30°, 45°, 60°, 75° или 90°.

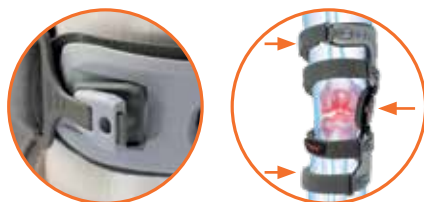

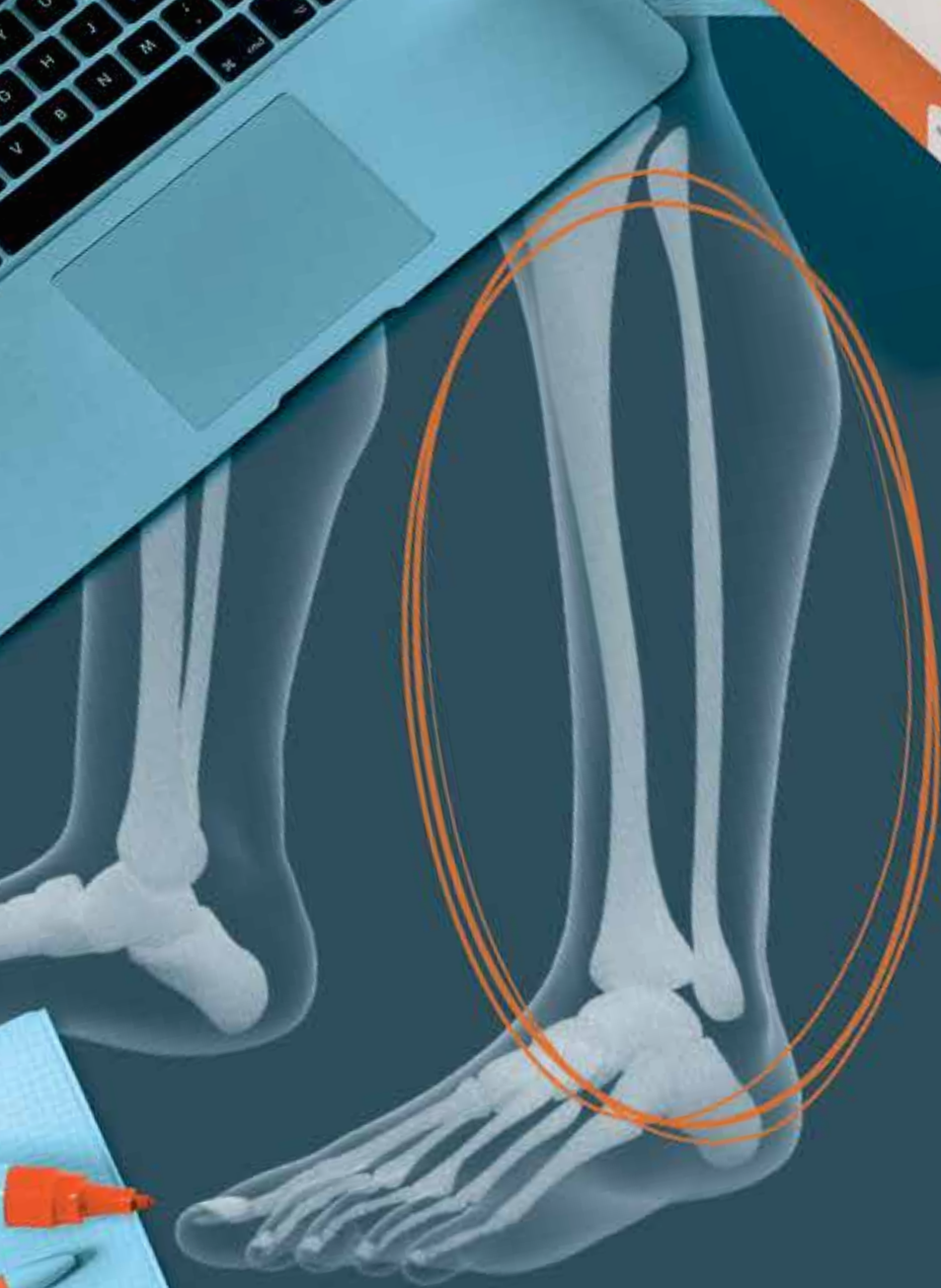

ГОЛЕНОСТОП





malleolastik 37

АРТ. M90137

Ортез на голеностопный сустав (эластичный)

ПОКАЗАНИЯ

- Травмы голеностопного сустава I степени
- Тендинит стопы и малоберцовой добавочной кости

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Силиконовые вставки для размещения лодыжки
- Верхний край усилен силиконовым шнуром для большей мягкости и прочности при натяжении.
- Анатомический дизайн, трикотажная ткань с трехмерной текстурой



АРТ.

Размер

Обхват голеностопа (см)

Цвет

M90137

0	1	2	3	4	5	6
15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29

синий

Двусторонний



malleoSkill 37

АРТ. M33137


Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Дисторсионные травмы голеностопного сустава I-й степени тяжести;
- Тендиниты подъема ноги и малоберцовой кости;

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция ортеза выполнена из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Задняя часть выполнена из CompresSkill:
 - эластичная компрессионная мультифибра;
 - Анатомический дизайн;
 - Превосходное прилегание к суставу.
- Отверстие на пятке

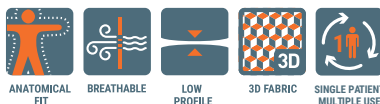

АРТ.

Размер

Обхват голеностопа (см)

Цвет

M33137

S	M	L	XL
15/20	20/25	25/30	30/36

серый

Двусторонний



malleoFIT 37

АРТ. MA1137


Ортез на голеностопный сустав из материала AirX™

ПОКАЗАНИЯ

- Растяжение связок голеностопного сустава I-й степени.
- Тендинопатия подъема стопы и малоберцовой кости.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ортез из дышащего материала AirX™
- Открытая пятка

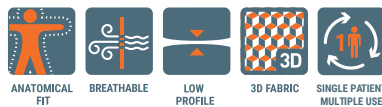

АРТ.	MA1137			
Размер	S	M	L	XL
Обхват голеностопа (см)	15/20	20/25	25/30	30/36
Цвет	черный			

Двусторонний



malleoLITE

АРТ. M33080


Ортез на голеностопный сустав с эластичным натяжением „восьмеркой“

ПОКАЗАНИЯ

- Вывихи голеностопного сустава I-й степени
- Тендинопатия сухожилий подъема стопы и малоберцовых мышц
- Артралгия легкой степени

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция изготовлена из эластичной, дышащей, антибактериальной и антистатической ткани Sensitive®
- Анатомичный дизайн и открытая конструкция для очень легкой посадки
- Задняя застежка на липучке Velcro®
- Эластичные летны, перекрещивающиеся на подъеме стопы

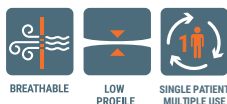

АРТ.	M33080		
Размер	S	M	L
Обхват подъема стопы (см)	24-28	28-33	33-38
Цвет	черный		

Двусторонний





malleoSkill 81

АПТ. M33181


Ортез на голеностопный сустав с эластичными лентами для натяжения „восьмеркой“ и спиральными ребрами

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение после дисторсионных травм II-й степени тяжести;
- Острые тендиниты;
- Функциональное восстановление после хирургических операций;
- вспомогательное средство при возобновлении занятий спортом при остаточных явлениях после дисторсионных травм II-й и III-й степени тяжести;
- Хроническая артралгия при артрозе голеностопного сустава.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция ортеза выполнена из ткани BreathSkill: дышащая ткань объемной текстуры со специальной внешней сетчатой вязкой.
- Подъем стопы выполнен из CompresSkill: эластичная компрессионная мультифибра;
 - Анатомический дизайн;
 - Превосходное прилегание к конечности
- Отверстие на пятке.
- Усиливающие спиралевидные ребра с обеих сторон.
- Две перекрещивающиеся ленты на липучках на подъеме стопы проходят под подошвой к щиколотке для максимально устойчивой фиксации ортеза.
- Верхний ремень на липучках для наилучшей фиксации.

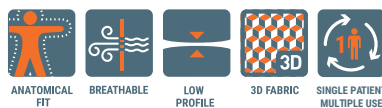

АПТ.	M33181			
Размер	S	M	L	XL
Обхват подъема стопы (см)	26/29	29/32	32/35	35/38
Цвет	серый			

Двусторонний



malleoFit 81

АПТ. MA1181


Ортез на голеностопный сустав из ткани AirX™ с эластичными лентами натяжения „восьмеркой“ и спиральными ребрами

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение после вывихов II-й степени
- Острые тендиниты
- Послеоперационное функциональное восстановление
- вспомогательное средство при возобновлении занятий спортом при остаточных явлениях от вывихов II-й и III-й степени
- Хроническая артралгия на артрозной основе голеностопного сустава

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из дышащей ткани AirX™
- Верхняя система застегивания с помощью стабилизирующего ремня и пряжки
- Усиливающие спиральные рейки с обеих сторон
- Перекрещивающиеся стяжки на подъеме ноги с проходом под подошвой для максимальной устойчивости
- Отверстие на пятке

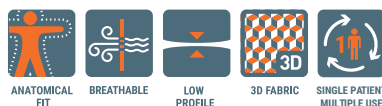

АПТ.	MA1181			
Размер	S	M	L	XL
Обхват подъема стопы (см)	26/29	29/32	32/35	35/38
Цвет	черный			

Двусторонний



malleostrong PRO

АРТ. MA1028 R/L

Ортез на голеностопный сустав с двумя поролоновыми накладками и латерально-медиальными тянущимися лентами

ПОКАЗАНИЯ

- Повреждения связок II и III степени.
- Послеоперационное функциональное восстановление.
- Функциональная реабилитация последствий перелома лодыжки.
- Хроническая нестабильность сустава плюсны и при занятиях спортом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Тонкая структура ткани выполнена по технологии Breath-o-prene®, обеспечивающей необходимую воздухопроницаемость изделия.
- Медиальные и латеральные вставки турсора покрыты мягким слоем материала МТР.
- Дополнительная задняя накладка для большего комфорта.
- Эластичный задний натяжной ремень.
- Латерально – медиальная лента для фиксации и усиления (можно укоротить при необходимости)



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



АРТ.	MA1028 R/L				
Размер	XS	S	M	L	XL
Размер обуви	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47
Цвет	черный				

Левый/правый



airstrong

АРТ. MA1029

Ортез на голеностопный сустав с накачиваемыми воздушными подкладками

ПОКАЗАНИЯ

- Повреждения связок II и III степени.
- Послеоперационное функциональное восстановление.
- Функциональная реабилитация последствий перелома лодыжки.
- Хроническая нестабильность сустава плюсны и при занятиях спортом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Надувные прокладки.
- Двусторонний каркас анатомической формы изготовлен из легкого и прочного пластика.
- Наилучшая фиксация на пятке достигается благодаря возможности регулировки на липучках Velcro®.
- Легко надевать, так как изделие полностью раскрывается
- Помпа в комплекте.



AIR PAD



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



АРТ.	MA1029
Размер	универсальный
Цвет	белый

Двусторонний



malleonite

АПТ. M90062

Ортез на голеностопный сустав (ночной, позиционный)

ПОКАЗАНИЯ

- Плантарный фасциит
- Тендинопатия ахиллова сухожилия
- Слабость ноги
- Боли при пробуждении

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Полимерная гибкая структура для персонализированного позиционирования при использовании регулировочного ремешка подошвенной флексии
- Мягкая и комфортная набивка
- Ремешки с Velcro® для регулировки на икре и ноге, с набивкой для оптимального комфорта



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АПТ.

M90062

Размер

S/M

L/XL

Размер обуви

36/42

43/48

Цвет

черный

Двусторонний



equal400

АПТ. M400

Ортез на голеностопный сустав (высокий, жесткий)

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение переломов в области лодыжки;
- Дисторсии III-й степени;
- Послеоперационные стадии остеосинтеза переломов в области лодыжки, восстановление связок щиколотки и тенорафия ахиллова сухожилия;
- Стабильные переломы стопы, щиколотки, большой берцовой кости и дистального отдела малой берцовой кости.
- Консервативное и послеоперационное лечение при переломах стопы / лодыжки / голени

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Применение этого тьютора рекомендуется только в том случае, если документально подтверждено, что перелом стабильный и существуют допустимые пределы угловой и ротационной деформации.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из прочного и легкого пластика;
- Противоскользящая резиновая подошва;
- Внутренняя подкладка подошвы из нетоксичного эвазота;
- Стержни, устанавливаемые с помощью липучек Velcro® для сцепления с подкладкой;
- Подкладка сапожка из мягкой пенорезины с двухслойной обивкой из ворсистого нейлона для сцепления с липучками Velcro®;
- Ремешки с застежкой на липучках Velcro®;
- Моющаяся подкладка.
- Доступно в высокой (REF.400) и низкой (REF. 450) версии



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АПТ.

M400

Размер

XS

S

M

L

XL

Размер обуви

33/36

36/39

39/44

44/47

> 47

Цвет

черный

Двусторонний

ОПЦИЯ: M501

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР: M501 Подпяточники, правый/левый



equal450

АПТ. M450

Ортез на голеностопный сустав (низкий, жесткий)

ПОКАЗАНИЯ

- Травмы мягких тканей
- От умеренного до тяжелого растяжения связок голеностопного сустава
- Травмы и боли передней части стопы, стопы и пятка
- Стабильные переломы стопы и / или лодыжки
- Послеоперационный



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Применение этого тьютора рекомендуется только в том случае, если документально подтверждено, что перелом стабильный и существуют допустимые пределы угловой и ротационной деформации

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из прочного и легкого пластика;
- Противоскользящая резиновая подошва;
- Внутренняя подкладка подошвы из нетоксичного эвасота;
- Стержни, устанавливаемые с помощью липучек Velcro® для сцепления с подкладкой;
- Подкладка сапожка из мягкой пенорезины с двухслойной обивкой из ворсистого нейлона для сцепления с липучками Velcro®;
- Ремешки с застежкой на липучках Velcro®;
- Моющаяся подкладка.
- Доступно в высокой (REF.400) и низкой (REF. 450) версии



АПТ.	M450
Размер	XS S M L XL
Размер обуви	33/36 36/39 39/44 44/47 > 47
Цвет	черный

Двусторонний

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР: M501 Подпяточники, правый/левый

ОПЦИЯ: M501



airstep tight walker diabetic

АПТ. M520

Ортез на голеностопный сустав (диабетический)

ПОКАЗАНИЯ

- Для пациентов с сенсорными расстройствами как сахарный диабет и сопутствующей с ним диабетической стопой.
- Язвы на плюсневой кости, лодыжке, пятке или на большом пальце ноги.
- Синдром «шаркающей стопы».



RADIO
LUCENT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



AIR PAD

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Использование данного ортеза рекомендовано только при наличии письменного заключения о стабильном характере перелома и приемлемых пределах углового и ротационного смещения.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Вставки из пенополиуретана для частичной разгрузки давления на подошву
- специальные носки для диабетиков и для диабетической стопы.
- передний усиливающий каркас для стабилизации стопы;
- оптимальный комфорт при ношении благодаря двум надувным подушечкам во внутренней части сапожка;
- основная часть изделия изготовлена из прочного, но легкого пластика;
- тьютор удобно сидит на ноге, благодаря пенополиуретановой прокладке;
- корректную фиксацию изделия на конечности обеспечивает система затягивания на липучках Velcro®;
- подошва тьютора оптимально приспособлена для передвижения ноги;
- могут быть добавлены ещё прокладки для лучшей адаптации к ноге.



ОПЦИЯ: M501



ОПЦИЯ: M505

АПТ.	M520
Размер	S M L
Размер обуви	35/39 39/44 > 44
Цвет	серый

Двусторонний

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР:

M501 Подпяточники, правый/левый

ВКЛЮЧЕНО: M505 Диабетический набор, подходит для правого и левого



опция: M501



опция: M505

airstep tight walker short

АПТ. M560

Ортез на голеностопный сустав (короткий)

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное и послеоперационное лечение переломов стопы, голеностопа и ноги;
- Значительные деформации костей III-й степени;
- Консервативное лечение после разрыва Ахиллесова сухожилия;
- Послеоперационный уход после соединения разорванного Ахиллесова сухожилия;
- До- и послеоперационная / посттравматическая иммобилизация.

CONТРОПОКАЗАНИЯ

- Использование данного тьютора рекомендовано только при наличии письменного заключения о стабильном характере перелома и приемлемых пределах углового и ротационного смещения.



АПТ.	M560		
Размер	S	M	L
Размер обуви	35/39	39/44	> 44
Цвет	серый		

Двусторонний

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Вставки из пенополиуретана для частичной разгрузки давления на подошву
- передний усиливающий каркас для стабилизации стопы;
- оптимальный комфорт при ношении благодаря двум надувным подушечкам во внутренней части сапожка;
- основная часть изделия изготовлена из прочного, но легкого пластика;
- тьютор удобно сидит на ноге, благодаря пенополиуретановой прокладке;
- корректную фиксацию изделия на конечности обеспечивает система затягивания на липучках Velcro®;
- подошва тьютора оптимально приспособлена для передвижения ноги;
- могут быть добавлены ещё прокладки для лучшей адаптации к ноге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР:

M501 Подпяточники, правый/левый
ВКЛЮЧЕНО: M505 Диабетический набор, подходит для правого и левого



опция: M501



опция: M505

airstep tight walker

АПТ. M550

Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное и послеоперационное лечение переломов стопы, голеностопа и ноги;
- значительные деформации костей III-й степени;
- консервативное лечение после разрыва Ахиллесова сухожилия;
- послеоперационный уход после соединения разорванного Ахиллесова сухожилия;
- до- и послеоперационная / посттравматическая иммобилизация.

CONТРОПОКАЗАНИЯ

- Использование данного ортеза рекомендовано только при наличии письменного заключения о стабильном характере перелома и приемлемых пределах углового и ротационного смещения.



АПТ.	M550		
Размер	S	M	L
Размер обуви	35/39	39/44	> 44
Цвет	серый		

Двусторонний

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Вставки из пенополиуретана для частичной разгрузки давления на подошву
- передний усиливающий каркас для стабилизации стопы;
- оптимальный комфорт при ношении благодаря двум надувным подушечкам во внутренней части сапожка;
- основная часть изделия изготовлена из прочного, но легкого пластика;
- тьютор удобно сидит на ноге, благодаря пенополиуретановой прокладке;
- корректную фиксацию изделия на конечности обеспечивает система затягивания на липучках Velcro®;
- подошва тьютора оптимально приспособлена для передвижения ноги;
- могут быть добавлены ещё прокладки для лучшей адаптации к ноге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР:

M501 Подпяточники, правый/левый
ВКЛЮЧЕНО: M505 Диабетический набор, подходит для правого и левого



r.o.m. walker

АПТ. M600

Ортез на голеностопный сустав (сапожок с шарниром)

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение переломов голеностопного сустава
- Деформирующие поражения голеностопного сустава 3-й степени
- Послеоперационная реабилитация переломов голеностопного сустава, стабилизация повреждённых связок голеностопного сустава, Ахиллова сухожилия
- Обеспечение подвижности при замедленном срастании большой берцовой кости
- Синдром «шаркающей стопы»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Применение этого тьютора рекомендуется только в том случае, если документально подтверждено, что перелом стабильный и существуют допустимые пределы угловой и ротационной деформации.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Основой каркас тьютора сделан из прочного легкого пластика;
- Антискользящая резиновая подошва.
- Внутри подошва наполнена нетоксичным эвазотом;
- Вертикальные шарниры и накладки фиксируются с помощью ремней для затягивания на липучках Velcro®;
- Стопа оборачивается в мягкую двойную пенополиуретановую прокладку с нейлоновым покрытием для лучшей фиксации ремней на липучках Velcro®;
- Затяжные ленты на липучках Velcro®;
- Внутреннюю подкладку для стопы можно стирать.



АПТ.

Размер

Размер обуви

Сгибание подошвы

Дорсальное сгибание

Цвет

M600

S	M	L
36/39	39/44	44/47
0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
черный		

Двусторонний



afo light

АПТ. M9050 R/L

Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Отвисание вялой стопы
- Спастическая конская стопа легкой и средней тяжести

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из полипропилена с закругленными краями
- Мягкая панель для защиты большой берцовой кости и голени (из двухслойного мультипрема с велюровым покрытием)
- Застежка с ремешком на липучках Velcro® с захватом голени
- С изменяемой при нагревании формой
- Застежка на липучках Velcro® на подъёме стопы



АПТ.

Размер

Высота (см)

Размер обуви

Цвет

M9050 R/L

S	M	L	XL
28	29	34	39
35/39	40/43	41/44	> 44
белый			

Левый/правый





afo extrastrong

АПТ. M9051 R/L

Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Парез стопы
- Спастическая конская стопа легкой и средней тяжести

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из не гигроскопического, недеформируемого, прочного и эластичного полиоксиметилена (ацетальная смола)
- Мягкая панель для защиты большой берцовой кости и голени (из двухслойного мультипрема с велюровым покрытием)
- Застежка с ремешком на липучках Velcro® с захватом голени
- Застежка на липучках Velcro® на подъеме ноги



АПТ.

Размер

Высота (см)

Размер обуви

Цвет

M9051 R/L

S	M	L	XL
28	29	34	39
35/39	40/43	41/44	> 44

светло-голубой

Левый/правый



affix

АПТ. M20050 - M20051 R/L

Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Вялый паралич стопы
- Спастическая конская стопа легкой и средней тяжести



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Для использования ТОЛЬКО с обувью на шнуровке
- Тонкий, незаметен под одеждой
- Изготовлено из дышащей перфорированной ткани
- Мягкая прокладка для крепления к обуви
- Растягивающаяся резинка для регулировки степени сгибания
- Гелевая накладка на ахиллово сухожилие
- Застежка с помощью лент на липучках
- Бандаж для среднего отдела стопы, предназначен для босой ноги (дополнительная опция)

АПТ.

Размер

Обхват лодыжки (см)

Цвет

M20050

XS	S	M	L
13/17	17/21	21/25	25/29

черный

Двусторонний

affix OPTION

Бандаж для среднего отдела стопы

АПТ.

Размер

Обхват лодыжки (см)

Цвет

M20051 R/L

S	M	L
17/21	21/25	25/29

черный

Левый/правый

ОПЦИЯ: M20051

Бандаж для среднего отдела стопы



СТОП





hallus valgus

АРТ. M360

Ортез на голеностопный сустав
(для большого пальца стопы)

ПОКАЗАНИЯ

- Вальгусная деформация большого пальца стопы
- Дисторсия большого пальца стопы

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Конструкция из пластика с внутренней обивкой
- Ремешки натяжения с застежкой на липучках Velcro®
- Мягкая обивка для ремешков.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

АРТ.

M360

Размер

S

M

L

Размер обуви

34/36

37/40

41/46

Цвет

белый

Левый/правый



Новинка 2022

havar

АРТ. M21361

Ортез на голеностопный сустав
(для большого пальца стопы)

ПОКАЗАНИЯ

- Вальгусная деформация большого пальца стопы
- Легкое или умеренное искривление большого пальца стопы
- Плюсневый бурсит большого пальца стопы

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Структура из полимерного материала с шарниром для плюснефалангового сустава
- Мягкая прокладка из пенополиуретана
- Регулируемые ремешки на липучках Velcro®
- Использовать ночью, без обуви или вместе с удобной обувью.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



LATEX FREE

АРТ.

M21361

Размер

универсальный

Цвет

белый



podifer 20

АРТ. M90020

Флебологические стельки (с метатарзальным валиком для разгрузки)

ПОКАЗАНИЯ

- Васкулопатия
- Плоскостопие и приведённая стопа
- Метатарзалгия

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Верхний слой из ткани с утком из серебряного волокна обладает антибактериальным



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



SILVER
FIBER



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



CUSTOMIZABLE
FIT

и противозапаховым естественным эффектом.

- Вязкоупругий промежуточный слой с эффектом памяти формы, оптимизированной толщиной. Способствует венозному оттоку благодаря помповому эффекту.
- Корпус из жесткого полиуретана для стабилизации и поддержки стопы при проносупинации. Наличие поперечной перекладки поддерживает плюсну и амортизирует ее при контакте с землей; кроме того, она интенсифицирует помповую функцию супинатора, улучшая венозный отток и стимулируя рефлексологию сердца и легких.
- Нижний слой из полиуретана с функцией защиты вышележащих слоев от износа и деформации. Легкость установки супинатора в обуви.

АРТ.	M90020							
Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	
Цвет	черный							

Поставляется парами



podifer 30

АРТ. M90030

Флебологические стельки

ПОКАЗАНИЯ

- Васкулопатия
- Плоскостопие и приведённая стопа

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Верхний слой из ткани с утком из серебряного волокна обладает антибактериальным и противозапаховым естественным эффектом.
- Вязкоупругий промежуточный слой с эффектом памяти формы, с оптимизированной толщиной. Способствует венозному оттоку благодаря помповому эффекту.
- Корпус из жесткого полиуретана для стабилизации и поддержки стопы при проносупинации.
- Нижний слой из полиуретана с функцией защиты вышележащих слоев от износа и деформации. Легкость установки супинатора в обуви.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



SILVER
FIBER



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



CUSTOMIZABLE
FIT

АРТ.	M90030							
Размер обуви	40	41	42	43	44	45	46	
Цвет	черный							

Поставляется парами



podifer 40

АРТ. M90040

Ревматические стельки

ПОКАЗАНИЯ

- Молоткообразные пальцы стопы в начальной стадии
- Отклонение наружу большого пальца стопы в начальной стадии
- Боли в суставах
- Метатарзалгия
- Плоскостопие и приведённая стопа

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Верхний слой из ткани с утком из серебряного волокна обладает антибактериальным и противозапаховым естественным эффектом.
- Специальный слой из этилвинилацетата самодеформируется на основе давления, которому он подвергается, заполняя зоны с наименьшим давлением и обеспечивая больший комфорт.
- Корпус из жесткого полиуретана для стабилизации и поддержки стопы при проносупинации.
- Вязкоупругий промежуточный слой с эффектом памяти формы, с оптимизированной толщиной.
- Нижний слой из полиуретана с функцией защиты вышележащих слоев от износа и деформации. Легкость установки супинатора в обуви.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



SILVER
FIBER



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



CUSTOMIZABLE
FIT

АРТ.	M90040												
Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Цвет	черный												

Поставляется парами



podifer 50

Арт. M90050

Амортизирующие стельки (с метатарзальным валиком для разгрузки)

ПОКАЗАНИЯ

- Талониты
- Плантарные фасцииты
- Плоскостопие и приведённая стопа
- Метатарзалгия

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Верхний слой из ткани с утком из серебряного волокна обладает антибактериальным и противозапаховым естественным эффектом.

- Фетр PodoDry, выводя пот наружу, способствует сохранению здоровья стопы.
- Вязкоупругий промежуточный слой с эффектом памяти формы, с оптимизированной толщиной.
- Амортизирующий материал для смягчения первого контакта стопы с землей.
- Нижний слой из полиуретана с функцией защиты вышележащих слоев от износа и деформации.
- Легкость установки супинатора в обуви.
- Корпус из жесткого полиуретана для стабилизации и поддержки стопы при проносупинации. Наличие поперечной перекладины поддерживает плюсну и амортизирует ее при контакте с землей; кроме того, она интенсифицирует помповую функцию супинатора, улучшая венозный отток и стимулируя рефлексологию сердца и легких

Арт.	M90050											
Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Цвет	черный											

Поставляется парами



podifer 60

Арт. M90060

Амортизирующие стельки

ПОКАЗАНИЯ

- Талониты
- Плантарные фасцииты
- Плоскостопие и приведённая стопа

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Верхний слой из ткани с утком из серебряного волокна обладает антибактериальным и противозапаховым естественным эффектом.
- Фетр PodoDry, выводя пот наружу, способствует сохранению здоровья стопы.
- Нижний слой из полиуретана с функцией защиты вышележащих слоев от износа и деформации.
- Легкость установки супинатора в обуви.
- Амортизирующий материал для смягчения первого контакта стопы с землей.
- Корпус из жесткого полиуретана для стабилизации и поддержки стопы при проносупинации.

Арт.	M90060											
Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Цвет	черный											

Поставляется парами





ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE





EPI-S32

АРТ. M19032

Ортез - шина для кисти-запястья-локтевого сустава

ПОКАЗАНИЯ

- Хронические боли от бурсита или тендинита



SEAMLESS
MADE WITH
MERZ
MACHINES
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан

АРТ.	M19032				
Размер	XS	S	M	L	XL
Обхват (см)*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Двусторонний/*Обхват предплечья



MANU-S19

АРТ. M19019

Ортез для запястья

ПОКАЗАНИЯ

- Последствия вывихов запястья
- Тендиниты и теносиновиты
- Воспалительные дегенеративные заболевания запястья



SEAMLESS
MADE WITH
MERZ
MACHINES
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан
- Отверстие для большого пальца руки

АРТ.	M19019				
Размер	XS	S	M	L	XL
Обхват (см)*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Двусторонний/*Обхват запястья



MIO-S33

АРТ. M19033

Бандаж на бедро

ПОКАЗАНИЯ

- Контрактуры и растяжения мышц бедра
- Вспомогательное средство при возобновлении занятий спортом после травм



SEAMLESS
MADE WITH
MERZ
MACHINES
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан
- Отверстие для большого пальца руки

АРТ.	M19033				
Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват (см)*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Двусторонний/*Обхват запястья



GENU-S60

АРТ. M19060

Ортез на коленный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами
- Начальные стадии артроза
- Тендиниты



SEAMLESS



MADE WITH
MERZ
MACHINES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан
- Верхний край усилен противоскользящим силиконом

АРТ.	M19060					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват (см)*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Двусторонний/*Обхват бедра в 15 см выше коленной чашечки



MIO-S34

АРТ. M19034

Бандаж на голень

ПОКАЗАНИЯ

- Контрактуры и растяжения мышц голени
- Вспомогательное средство при возобновлении занятий спортом после травм



SEAMLESS



MADE WITH
MERZ
MACHINES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан

АРТ.	M19034			
Размер	S	M	L	XL
Обхват (см)*	33/36	36/39	39/43	43/48

Двусторонний/*Обхват голени



MALLEO-S37

АРТ. M19037

Ортез на голеностопный сустав

ПОКАЗАНИЯ

- Ушибы
- Тендиниты подъема стопы и малоберцовой кости



SEAMLESS



MADE WITH
MERZ
MACHINES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Трубчатый, анатомический и эластичный для идеального прилегания к конечности
- Воздухопроницаемый
- Средне-высокая компрессионная способность
- Удобные края
- СОСТАВ: 70% полиамид, 30% эластан
- Специальная текстура на пятке для дополнительной прочности

АРТ.	M19037				
Размер	XS	S	M	L	XL
Обхват (см)*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Двусторонний/*Обхват голеностопа



ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better



www.orthoservice.com



UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato del C.R.E.D.I.A.
Body accreditato by A.I.C.C.E.C.I.A.



9DCCT00015RU004_1022



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): **Orthoservice AG** (CH) 6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Copyright Orthoservice Ro+Ten 2022

ORTHOSERVICE AG

Via Milano, 7
CH-6830 Chiasso (TI)
Switzerland
Tel. +41 (0) 91 822 00 88
fax +41 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com
www.orthoservice.com

